

## オステムトルクⅡ

### \*【禁忌・禁止】

- ①劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
- ②器具の形態変更や改造等をしないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 概要

本品は術式により5～35N/cm まで7種類のトルクスケールが選択できるコントラ角度付のダイヤル式トルクコントローラーである。カバースクリューおよびヒーリングアパットメントの連結または分離の目的である。

#### 2. 形状




### \*【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術時に、カバースクリューまたはヒーリングアパットメントの連結もしくは分離に用いる器具である。手動式で、再使用可能である。

### \*【使用方法等】

1. ヘッド部のラッチキーを回し、カバースクリューまたはヒーリングアパットメント用のドライバーを完全に挿入した後、逆方向に戻す。(図1)

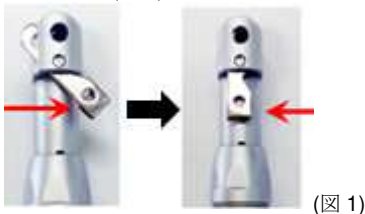

2. カバースクリューまたはヒーリングアパットメント用のドライバーを軽く引っ張り、正しく取り付けられていることを確認する。(図2)



3. ハンドルを固定し、トルクセレクターの矢印をハンドル上に表示されている希望のトルク値にあわせる。(図3)



4. ドライバー先端をカバースクリューまたはヒーリングアパットメントの穴に差し込み。ハンドルを“ガチッ”と音がするまで右に回す。(図4)



5. 取り外す際に、逆方向に回す。(図5)



### \*【使用上の注意】

- ・使用前または使用後は必ずヘッド部を分離し洗浄および滅菌すること。
- ・使用後に、セレクターの矢印を5N/cm に合わせて保管すること。
- ・金属腐食を起こす恐れのある薬剤、強酸性水などは使用しないこと。
- ・高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

### \*【保守・点検に係る事項】

- ・推奨滅菌条件：
  - <ヘッド部> 高圧蒸気滅菌 135℃ 20分
  - <把持部> 洗浄後消毒用アルコールで消毒し、乾燥させる

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN  
 東京都品川区上大崎四丁目5番37号  
 TEL：03-5747-9441  
 FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社 (大韓民国)  
 (OSSTEM Implant CO., LTD.)