

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填シーラ 36095000

AH プラス

**再使用禁止 (ミキシング/イントラオーラルチップのみ)

【禁忌・禁止】

1. 本品成分 (エポキシレジン及びアミン等) に対して、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ** 2. ミキシング/イントラオーラルチップは再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. AH プラス
ペースト (ペースト A)
キャタリスト (ペースト B)
 2. AH プラス ジェット
シリンジ (ペースト A 及びペースト B)
- ** ミキシング/イントラオーラルチップ

成分：

	色調	成分
ペースト A	黄色 ペースト	ビスフェノール A 型エポキシレジン、 ビスフェノール F 型エポキシレジン、 タングステン酸カルシウム、酸化ジルコニウム、 シリカ、黄色色素
ペースト B	白色 ペースト	ジベンジルジアミン、アミナダマンタン、 トリシクロデカンジアミン、タングステン酸カルシウム、 酸化ジルコニウム、シリカ、シリコンオイル

** 該当規格：JIS T 6522

** ※ミキシング/イントラオーラルチップは、コア X フロー (認証番号：231AGBZX00019000) の付属品と同一です。

【使用目的又は効果】

本品は、混和したペーストを拡大清掃後の根管内に歯冠側より充填することにより、根管の永久的な封鎖のために用いる。

【使用方法等】

1. 根管拡大・清掃
通法により、根管の拡大及び清掃を行う。
2. ペーストの混和・注入
《AH プラス》
 - (1) 練板に等量のペースト A 及びペースト B を出し、金属スパチュラを用いて均一に混和する。
 - (2) 根管充填ポイントやリーマー又はレンツロ等を用いて、根管内にペーストを注入する。《AH プラス ジェット》
 - ** (1) シリンジ先端のキャップを取り外し、ミキシング/イントラオーラルチップを確実に装着する。
 - ** (2) ミキシング/イントラオーラルチップの先端を根管口に差込み、シリンジのプランジャーを押して根管内にペーストを注入する。
3. 根管充填
根管充填ポイント (ガッターチャポイント等) を併用して、通法により根管充填を行う。根管充填の状態は、X線写真で確認する。
操作時間 (23℃)：約 4 時間

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 本品が口腔粘膜に接触しないよう注意すること (急性炎症を起こすことがある)。万が一本品が口腔粘膜に触れた場合には、綿球等ですぐにペーストを除去し、口腔内を大量の水で洗浄して口をすすがせること。
2. 万が一、大量の本品が下顎管内に過剰充填された場合には、外科的な除去等の処置の実施を速やかに検討すること。
3. 本品の充填の際には、ペーストに気泡を巻き込まないよう十分注意すること。

4. AH プラスのペースト及びキャタリストのキャップを取り違えないよう注意すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)
 - (1) 本品を使用する際には、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。
 - (2) 本品の使用により過敏症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 本品の使用により過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し医師の診断を受けること。
 - (2) 硬化前の本品が皮膚に直接触れないよう注意すること。術者は保護手袋等を使用して本品を取り扱い、硬化前の本品が接触した場合には、すぐに大量の水で洗浄すること。
 - (3) 本品が目に入らないよう注意すること。万が一、本品が目に入った場合には、すぐに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けること。
 - (4) 本品を誤飲した場合には、すぐに大量の水を飲むこと。悪心や吐き気等の症状があらわれた場合には、医師の診断を受けること。
 - ** (5) ミキシング/イントラオーラルチップは 1 回の混和・注入操作ごとに使用し、再使用しないこと。
 - (6) 本品と他の製品を混用しないこと。

3. 不具合・有害事象

有害事象

本品の使用に伴い、発疹、皮膚炎などの過敏症状が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 本品は直射日光を避け 10～24℃で保管し、使用後はキャップをしっかり閉めて保管すること。
2. ペースト B は分離することがあるが、品質には問題ない。
3. 本品は、歯科従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本品は、包装に記載の有効期間までに使用すること。
(記載の有効期間は、製造業者データによる)

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 ドイツ
製造業者 デンツプライ デトレイ社
Dentsply DeTrey GmbH

【問い合わせ窓口】

カスタマーサービス

電話番号 0120-789-123