

器 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 16195000

## マトリックスバンド

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

- ・必要に応じてラバーダムなどの防湿処置を行うこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外の使用はしないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

### 【形状・構造及び原理等】


材質：ポリエチレンテレフタレート

形状：フォームタイプ（8種類）



サイズ	厚さ
大白歯用ラージ	各サイズ 0.075mm と 0.05mm の2種類
大白歯用ミディアム	
小白歯用ミディアム	
小白歯用スモール	

テープタイプ

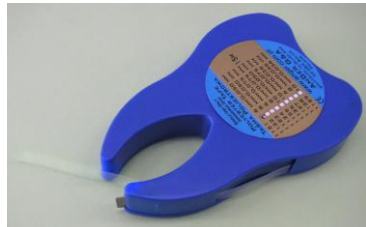

幅 6mm、長さ 15m、厚さ 0.05mm

### 【使用目的又は効果】

修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるポリエステル製のバンドである。修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。

### 【使用方法等】

1. 通法に従って窩洞形成を行い、歯牙の大きさや隣接状態に応じた適切なマトリックスバンドを選択する。マトリックスバンドの形状は適用部位に合わせカットして調整することができる。
2. マトリックスバンドを歯牙に取り付け固定する。必要に応じてマトリックスリテイナや歯科用マトリックスウェッジを併用する。
3. 通法に従い窩洞充填、重合後にマトリックスバンドを外し、形態修正、研磨を行う。

### 【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・誤って口腔軟組織を傷つける事がないよう充分注意すること。
- ・使用の際は誤飲させないよう充分注意すること。飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\* \*\*

製造販売業者：フィード株式会社  
商品インフォメーションデスク  
電話 0120-004-504

製造業者：アンガー ジー アンド エー デンタル  
マニュファクチュアリング エンタープライズ  
(ポーランド)  
(AnGer G&A Dental Manufacturing Enterprise)