

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用仮封材(70871002)

ジーシー キャビトン

【禁忌・禁止】

本品の成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

- ・パテ状（30g/函）（色調：ピンク、ホワイト）

主成分

- ・酸化亜鉛、硫酸カルシウム、酢酸ビニル樹脂

原理

- ・硫酸カルシウムが唾液と接触して唾液中の水分と反応し硬化する。

【使用目的又は効果】

本品は、窩洞形成後の一時的な仮封を目的に使用する。（医薬品を含まない）

【使用目的又は効果に関連する使用上の注意】

- 1) 窩洞が濡れていると充填時に密着しないので、綿球で拭う程度に乾燥させること。
- 2) 長期にわたる適用により除去が困難になることもあるので、本品の適用は2週間程度とし、適宜新しい材料で仮封し直すこと。

【使用方法等】

- 1) 窩洞を綿球で拭い、過剰な水分を除去します。
- 2) 窩洞に適量を充填し、濡れた充填器などで表面を形成後、すぐに口を閉じさせて唾液に接触させます。
- 3) 充填後約1時間は、強く咬合しないように患者へ指示します。
- 4) 硬化後の除去は、エキスカベーター等のハンドインストルメントで除去します。必要に応じて、回転切削器具により低速回転で除去します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 窩洞が深い場合には、覆罩、裏層をしてから本品を充填すること。〔歯髄に影響を及ぼす可能性がある〕
- 2) 窩洞に充填後、余剰な部分を除去する際には、患者が誤って飲み込むことがないようにバキュームによる吸引等を行いながら、注意して除去すること。
- 3) 本品は水分との接触により硬化が促進されることから、濡れた器具等で採取しないこと。
- 4) 本品を充填する際は、過剰に圧をかけないように注意すること。〔歯髄に影響を及ぼす可能性がある〕
- 5) 充填物除去の際、本品が窩洞に付着して残った場合、アルコール綿球で拭い除去すること。〔補綴物と歯牙との接着を阻害する可能性がある〕

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適應すること）

①薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適應すること。

- 2) 重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

③本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。また皮膚に付着した場合には、すぐに多量の流水で洗浄すること。〔目の損傷の可能性がある〕

④充填後約1時間は、強く咬合しないように患者へ指示すること。〔崩壊して封鎖性が得られなくなる可能性がある〕

⑤本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。

⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

⑦他の製品と混用しないこと。

3) 相互作用

(1) [併用注意]（併用に注意すること）

- ①ユージオール系の材料の上に本品を使用する場合は、綿球で覆うか、又はワセリンを塗布した上に本品を填入し、直接填入しないこと。〔硬化不良を起こす原因になる〕

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・湿度の高い場所では保管しない。
- ・直射日光を避け、室温で保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
- ・本品は、空気中の水分によって徐々に硬化する性質があるので、ペーストの容器は、使用后すぐに密栓する。

【有効期限】

本材は、包装に記載の使用期限*までに使用する。

※（例 EXP. 2018-02 は
使用期限2018年 2月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
主たる設計元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480