

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ユーティリティワックス（70896000）

ジーシー ユーティリティワックス

【形状・構造及び原理等】

形状：棒状
色調：レッド、ピンク、ホワイト*
主成分：マイクロクリスタリンワックス
原理：ワックスの柔らかさ、粘着性などにより技工操作に使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社
発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために補助的に用いる多目的ワックス

【使用方法等】

- 1) 適当な長さに切断して、以下の用途に使用します。
 - ①アルジネート印象用既製トレーの辺縁形成及び修正
 - ②咬合堤部の概形形成及び修正
 - ③印象時の歯間空隙及びアンダーカット部のブロックアウト
 - ④模型製作におけるボクシングの時のビーディング
 - ⑤前歯の選択及び試適のための仮排列
 - ⑥模型のアンダーカット部のブロックアウト
 - ⑦円錐台へのワックスパターンの植立
 - ⑧ダウエルピンの固定
 - ⑨その他

【使用方法に関連する使用上の注意】*

- 1) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 2) 湯煎等により本品を軟化させる際、火傷に注意すること。

【使用上の注意】*

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること。）
 - ①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起した患者/術者においては、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせる/受けること。
 - ②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起したときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ③本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ④本品の誤飲には充分注意すること。〔製品の誤飲が人体に影響する可能性がある〕
 - ⑤本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】*

- ・室温で保管する。
- ・本品を高湿となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しない。
- ・保管場所には消火器を備える。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。
- ・口腔内使用したものは、医療廃棄物として廃棄する。