

## カスタム印象トレー

再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止
- (2) 本製品に使用している材質に発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある医療従事者および患者への使用はしないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

[形状]

用途	色	サイズ
有歯顎全顎上	レッド	XL(45), L(44), M(43), S(42)
有歯顎全顎下	イエロー	XL(54), L(53), M(52), S(51)
有歯顎片顎上左、下右	グリーン	(ワンサイズ)
有歯顎片顎上右、下左	グリーン	(ワンサイズ)
無歯顎上	グリーン	XXL(35), XL(34), L(33), M(32), S(31)
無歯顎下	グリーン	XXL(25), XL(24), L(23), M(22), S(21)

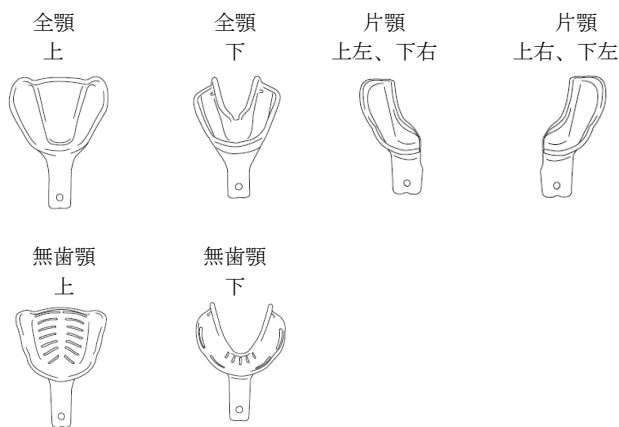

[材質] ポリ乳酸、ポリプロピレン

[構成品] キャリパー、サイズ表(有歯顎用又は無歯顎用)

### 【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具である。

### 【使用方法等】

[準備]

- ・70℃の温水浴を準備する。


・印象トレーを選択する。(有歯顎全顎又は無歯顎)

- (1) キャリパーを患者の口腔内に挿入し、顎幅に合わせてキャリパーを広げる。(口腔内での測定位置はサイズ表を参照する。)

- (2) キャリパーを顎幅に保持したまま取り出し、適切なトレーを選択する。(キャリパーでトレーサイズを測る時は下図の測り方を参照すること。)

<上顎用>

<下顎用>

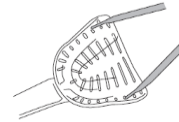

[印象採得]

- (1) トレーを70℃の温水浴に1分間浸ける。
- (2) 温水浴からトレーを取り出し、トレーを変形させる。
- (3) 患者の口腔内で、印象トレーが適当に成型させ、約5秒間静置する。必要があれば、再度温水浴に浸けて成型する。
- (4) 冷水で洗浄する。
- (5) トレーに印象材を注入する。
- (6) 患者の口腔内に入れ、印象材の使用方法に従って印象を採得する。
- (7) 印象採得完了後、トレーを口腔内から取り出す。

「使用方法等に関連する使用上の注意」

患者の嘔吐反射をもたらす恐れがあるため、適用するトレーのサイズ、盛る印象材の量、緩さを適切にすること。また、印象採得中は患者の状態に注意すること。

### 【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。  
破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷や劣化が確認された場合は使用しないこと。
- (2) 破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないこと。
- (3) 成型時に使用する温水の温度は、推奨温度を守ること。
- (4) 成型後は、冷水で洗浄し、冷却されていることを確認してから使用すること。
- (5) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (6) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (7) かゆみ、発赤、かぶれ等のアレルギー症状を起した場合には、使用を中止し、水でよく流してから医師に相談すること。
- (8) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自自治体の指導に従った方法で適切に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 25℃以下の環境で保管すること。
- (2) 直射日光、水分(水漏れ)、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧(物理的負荷)及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (3) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: プレミアムプラスジャパン株式会社  
電話番号 06-6845-0066

製造業者: CLINICIAN'S CHOICE DENTAL PRODUCTS, INC.  
(国名: カナダ)