

## 樹脂コーティング印象用トレー

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

金属表面にウレタン樹脂コーティングされた器具。

#### 〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り

種類：上顎用：L（グリーン）、M（ブルー）、S（オレンジ）

下顎用：L（グリーン）、M（ブルー）、S（オレンジ）

片顎左右用（ブルー）、前歯上下顎用（ブルー）



#### 〔原理〕

本品に印象材を盛り、口腔内に入れ圧接させることで印象採得できる。

### 【使用目的又は効果】

印象採得のために用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 患者の口腔内に本品を仮入れし、サイズが適正な事を確認する。
- 2) 本品に印象材を盛り圧接し、印象材の硬化後口腔内から取り外す。（硬化時間等については、使用する印象材の説明書に従う事）。

### 【使用上の注意事項】

#### 1. 家庭用洗剤の使用注意。

家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので注意する。

#### 2. 機能水の使用禁止。

超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。

#### 3. 洗浄、消毒、滅菌上の注意

- ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがある。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- ・使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。

#### 4. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。

コーティング材の剥がれの原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

#### 5. 保管上の注意。

- ・化学製品と一緒に収納・保管しない事。
- ・使用前・使用後には必ず破損、ヒビ、大きな腐食、突起物等がないか確認する事。
- ・水分が付着したまま長時間放置するとシミや腐食等の原因となるため、十分乾燥させてから保管する事。

#### 6. 患者への使用上の注意。

- ・小児又は嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるので使用する際は、十分に注意する事。

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・オートクレーブ滅菌不可。

### 【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいししない事。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：B. H MEDICAL PRODUCTS CO., LTD (China)