

一般医療機器

歯科材料07 歯科用ワックス
歯科用咬合堤ワックス
バイトワックス

JMDN38602000

【形状・構造及び原理等】

該当規格：JIS T6502「歯科用パラフィンワックス」（タイプ2）

形状：板状

サイズ：90×148mm（スリット幅15mm）

成分・分量

成分	規格	分量 (%)
パラフィン	日局	89.0
サラシミツロウ	日局	非公開
カルナウバロウ	日局	非公開
セレシン	粧原基	非公開
パーマネントレッド4R	JIS K5209	微量

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：株式会社ルビー

住所：〒582-0005

大阪府柏原市法善寺1丁目13-1

電話番号：072-972-0961

ホームページ：<https://www.ruby-dental.jp>

物理的性質

融点		56.4℃
フロー（加圧短縮率）	23℃	0%
	37℃	1.8%
	45℃	81.1%

【使用目的又は効果】

主として、天然歯及び義歯の咬合状態を正確に記録する咬合採得用ワックス。

【使用方法等】

板状のワックスを炎またはお湯等で加熱し、適度に軟化させ咬合採得を行う。

【使用上の注意】

[使用注意]

- ①本材は、可燃性であるので使用の際、火傷をしないよう注意すること。
- ②本材を使用目的以外には使用しないこと。
- ③本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び使用期限等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

- ・室温保管
- ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。