


醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	"柯惠"舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)	申請廠商	美敦力醫療產品股份有限公司
--------	-----------------------	------	---------------

"柯惠"舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)
 "Covidien" Syneture MAXON Monofilament
 Polyglyconate Synthetic Absorbable Suture
 衛署醫器輸字第 019552 號
 批號：詳見標示
 保存期限：詳見標示
 藥商名稱：美敦力醫療產品股份有限公司
 藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載
 製造廠名稱：(O)COVIDIEN LLC；(P)COVIDIEN
 製造廠地址：(O)15 HAMPSHIRE STREET MANSFIELD, MA
 02048 USA；(P)60 MIDDLETOWN AVENUE, NORTH
 HAVEN, CONNECTICUT 06473, U.S.A.



107. 2. 23

**市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文仿單。但
 如市售醫療器材同時放置中、外文仿單者，外文仿單
 內容須與核定本之中文仿單內容相符。**

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	"柯惠"舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)	申請廠商	美敦力醫療產品股份有限公司
--------	-----------------------	------	---------------



107. 2. 23



COVIDIEN™	
NEEDLE TYPES / TYPES D'AIGUILLES / NADELARTEN / PUNTA DEGLI AGHI / TIPOS DE AGULHAS / TIPOS DE AGUJAS / TYPE NAALDEN	
●	Taper / Ronde / Schräge / Rastremazione / Aguja Taper / Vela / Tabs / Konisk / Kartio- / Κώνος / Zwężenie / Sivri / Конусная / Kužel
▼	Cutting / Triangulaire inversée / Schnitt / Taglio / Corte / Snijden / Skärande / Skæring / Leikkaus / Κοπή / Tnaçe / Kesim / Режущая / Rezáni Conventional Cutting / Triangulaire conventionnelle / Konventioneller Schnitt / Taglio convenzionale / Corte convencional / Gewoon snijden / Konventionell skärande / Konventionel skæring / Perinteinen leikkaus / Συμβατική κοπή / Konwencjonalnie tnaçe / Geleneksel Kesim / Обычная режущая / Konvenční řezání
▲	Tapercutting / Ronde conique / Schrägschnitt / Tapercutting / Corte de aguja Taper / Corte de vela / Tabs snijden / Konisk skärande / Konisk skæring / Kartioleikkaus / Κωνική κοπή / Zwężenie-tnaçe / Sivri kesim / Конусная режущая
●	Blunt Point / Bout arrondi / Stumpfe Spitze / Punto senza filo / Punta roma / Ponta romba / Stompe punt / Trubbig spets / Stump spids / Tyllppä kärki / Αμβλεία αιχμή / Tępo zakończzone / Kör Sivri Uç / Тупоконечная
●	Blunt Taper Point / Bout conique arrondi / Stumpfe Schrägschneidspitze / Punto di rastremazione senza filo / Punta cónica roma / Ponta de vela romba / Stompe tabse punt / Trubbig konisk spets / Stump konisk spids / Tyllppä kartioleikkaus / Αμβλεία κωνική αιχμή / Tępo zakończzone ze zwężeniem / Kör Sivri Uç / Тупоконечная конусная
●	Penetrating Taper / Ronde de pénétration / Penetrierende Schräge / Rastremazione penetrante / Punta cilíndrica penetrante / Vela de penetração / Doorlopend tabs / Penetrenderende konisk / Penetrenderende konisk / Sisääntyöntävä kartio / Κώνος δειοδούσης / Проникающая конусная
◀	Spatula / Spatulée / Spatel / Spatola / Espátula / Spatel / Spatel / Spatel / Lasta / Σπάτουλα / Łopatka / Spatula / Лопатообразная (шпатель) / Stërka
◀	Premium Spatula / Spatulée prémium / Spitzenspatel / Spatola premium / Espátula de primera / Espátula premium / Premium spatel / Premium spatel / Premium spatel / Ensiluokkainen lasta / Σπάτουλα Premium / Łopatka Premium / Özel Spatula / Лопатообразная (шпатель) повышенного качества
◀	Inverted Premium Spatula / Spatulée prémium inversée / Invertierter Spitzenspatel / Spatola premium invertita / Espátula de primera invertida / Espátula Premium invertida / Geïnverteerde premium spatel / Inverteerd premium spatel / Omvendt premium spatel / Taitettu ensiluokkainen lasta / Ανάστροφη σπάτουλα Premium / Odwrócona łopatka Premium / Ters çevrilmiş Özel Spatula / Лопатообразная (шпатель), обратная
◀	Multi-Purpose / Multi usage / Mehrzweck / Multi-scopo / Multiusos / Multi-uso / Voor verschillende doeleinden / Multibruk / Universal / Monikäyttöinen / Πολλών χρήσεων / Uniwersalne / Çok Amaçlı / Многоцелевая
◀	Diamond Point / Pointe en losange / Diamantspitze / Punto diamante / Punta de diamante / Ponta de diamante / Diamantpunt / Diamantspets / Diamantspids / Kulmikas kärki / Ρομβοειδής αιχμή / Końcówka w kształcie rombu / Elmas Uç / Салмазным наконечником
◀	X-Cosmetic Cutting / Découpe cosmétique en X / X-Kosmetik-Schnitt / Taglio X-cosmetico / Corte cosmético X / Corte estético em X / X-cosmetisch snijden / X-kosmetisk skärande / X-kosmetisk skæring / X-kosmeettinen leikkaus / X-Κοσμητική κοπή / Cięcie kosmetyczne X / Düzgün Kesim / Режущая косметическая (X-Cosmetic)
◀	Loop / Boucle / Schlaufe / Occhiello / Bucle / Laço / Lus / Ögla / Løkke / Silmukka / Βρόχος / Petla / Spiral / Петля
D-Tach	Removable Needles / Aiguilles amovibles / Abnehmbare Nadeln / Aghi Rimovibili / Agujas extraíbles / Agulhas Removíveis / Verwijderbare naald / Avtagbar nål / Aftagelig nål / Irrotettava neula / Αφαιρούμενη βελόνα / Wymienna igła / Съёмная игла

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

107. 2. 23



Product information enclosed

CLEAR / INCOLOR / KLAAR / INCOLOR / CLARO / INCOLOR / HELDER / GEWONSKINLIG / KIAR / KIRKAS / ALMONIEZ / PRZETROZYSTY / SEFAE / ПРОЗРАЧНАЯ / CHA / ATLASZÓ / CIRÁ / BLANK / PROZOREN / 亮色 / 透明 / 맑은 / ЧИСТО / TRANSPARENT / LABIRASTEV / SAURSPIDIGS / PROZIRNO / BEZBOINI / PERMATOMA / GREEN / VERIE / GRÜN / VERDE / GRÖN / GRÜN / VINEËA / ПРАЗИНО / ZIELENO / YESIL / ЗЕЛЕНАЯ / ZELENÄ / ZOLD / ZELENÄ / GRÖNN / ZELÉN / 綠色 / 綠色 / 녹색 / Зелёный / VERDE / NONHELINE / ZNAŠ / ZELENÄ / ZELENÄ / ZELENÄ / ZALVA

Maxon™

Monofilament Polyglyconate Synthetic Absorbable Suture
Suture synthétique résorbable monofilament en polyglyconate
Synthetisches resorbierbares monofiles Nahtmaterial aus Polyglykonat
Sutura riassorbibile sintetica in poligliconato monofilamento
Sutura reabsorbible sintética de poligliconato monofilamento
Sutura Absorvível Sintética e Monofilamentosa de Poligliconato
Synthetisch, absorbeerbaar monofilamenthechtdraad van polyglyconaat
Monofil syntetisk resorberbar polyglykonatsutur
Synтетisk resorberbar polyglyconatmonofilamentsutur
Yksisäikeinen synteettinen resorboituva polyglykonaattiomelaine
Μονόκλωνο, Πολυγλυκονικό, Συνθετικό, Απορροφήσιμο Ράμμα
Monofilamentowe wchłaniałne syntetyczne nici chirurgiczne z poliglikonianu
Monofilament, Poliglikonat, Sentetik, Emilebilir Dikiş İpliği
Рассасывающийся синтетический монофиламентный шовный материал из полигликоната

Monofilamentní polyglykonátový syntetický vstřebatelný šicí materiál
Egyszálás poliglikonát szintetikus felszívódó fonalak
Monofilamentné polyglykonátové syntetické vstrebateľné nite
Monofilament polyglykonat syntetisk absorberbar sutur
Monofilamentna sintetična vpojna sutura iz poliglikonata
单纤维聚甘醇碳酸可吸收缝合线
單絲聚甘醇碳酸合成可吸收縫合線
단섬유 폴리글리코네이트 합성 흡수성 봉합사
Синтетичен еднонишков абсорбируем хирургически конец от полигликонат
Sutură sintetică absorbabilă din poligliconat cu monofilament
Monofilamentne poliglikonaadist resorbeeruv sünteetilise õmblusmaterjal
Viendzīslas poliglikonāta sintētiska absorbējama šuve
Monofilamentni poliglikonatni sintetički apsorbirajući kirurški konac
Monofilamentni poliglikonatni sintetički resorptivni konac
Vienagijis poliglikonato sintetinis absorbuojamasis siūlas

Syneture™

STERILE EO



Single use

Rx ONLY



Do not sterilize



Do not use if package is opened or damaged



Caution, consult accompanying documents



Upper temperature limit



Made from 100% recycled fibres.
Minimum 35% post-consumer content.

CE 0123


U.S. Patent 5,860,517
© 2011 Covidien. Made in USA.
Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.
www.covidien.com
Maxon™ sutures are USP9F except for diameter.



107. 2. 2

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	"柯惠"舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)	申請廠商	美敦力醫療產品股份有限公司
--------	-----------------------	------	---------------

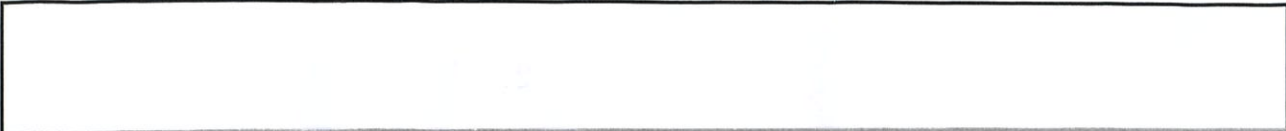

COVIDIEN™

8886 6127-11

Maxon™ CV

**Monofilament
Absorbable Suture**

6-0 0.7 Metric


30" 75 cm GREEN

Surgalloy™
CV-1
TAPER

3/8 9mm

LOT XXXXXXXXXX Use by YYYY-MM-DD

COVIDIEN™	
NEEDLE TYPES / TYPES D'AIGUILLES / NADELARTEN / PUNTA DEGLI AGHI / TIPOS DE AGULHAS / TIPOS DE AGUJAS / TYPE NAALDEN	
⊙	Taper / Ronde / Schräge / Rastremazione / Aguja Taper / Vela / Tabs / Konisk / Kartio- / Κώνος / Zwęzenie / Sivri / Конусная / Kužel
▼	Cutting / Triangulaire inversée / Schnitt / Taglio / Corte / Snijden / Skärande / Skæring / leikkaus / Κοπή / Tnaçe / Kesim / Режущая / Rezání Conventional Cutting / Triangulaire conventionnelle / Konventioneller Schnitt / Taglio convenzionale / Corte convencional / Gewoon snijden / Konventionell skärande / Konventionel skæring / Perinteinen leikkaus / Συμβατική κοπή / Konwencjonalnie tnaçe / Geleneksel Kesim / Обычная режущая / Konvenční řezání
▲	Taper cutting / Ronde conique / Schrägschnitt / Taper cutting / Corte de aguja Taper / Corte de vela / Tabs snijden / Konisk skärande / Konisk skæring / Kartioleikkaus / Κωνική κοπή / Zwęzenie-tnaçe / Sivri kesim / Конусная режущая
●	Blunt Point / Bout arrondi / Stumpfe Spitze / Punto senza filo / Punta roma / Ponta romba / Stompe punt / Trubbig spets / Stump spids / Typpä kärki / Αμβλεία αιχμή / Тупо zakończona / Kör Uç / Тупоконечная
⊙	Blunt Taper Point / Bout conique arrondi / Stumpfe Schrägspitze / Punto di rastremazione senza filo / Punta cónica roma / Ponta de vela romba / Stompe tabse punt / Trubbig konisk spets / Stump konisk spids / Typpä kartiokärki / Αμβλεία κωνική αιχμή / Тупо zakończona ze zwężeniem / Kör Sivri Uç / Тупоконечная конусная
⊙	Penetrating Taper / Ronde de pénétration / Penetrierende Schräge / Rastremazione penetrante / Punta cilíndrica penetrante / Vela de penetração / Doorlopend tabs / Penetrerende konisk / Penetrerende konisk / Sisääntyöntävä kartio / Κώνος διείσδυσης / Zwęzenie penetrujące / Keskin Sivri / Проникающая конусная
▭	Spatula / Spatulée / Spatel / Spatola / Espátula / Spatel / Spatel / Spatel / Lasta / Σπάτουλα / Łopatka / Spatula / Лопатообразная (шпатель) / Stërka
▭	Premium Spatula / Spatulée prémium / Spitzenspatel / Spatola premium / Espátula de primera / Espátula premium / Premium spatel / Premium spatel / Premium spatel / Ensiluokkainen lasta / Σπάτουλα Premium / Łopatka Premium / Özel Spatula / Лопатообразная (шпатель) повышенного качества
▭	Inverted Premium Spatula / Spatulée prémium inversée / Invertierter Spitzenspatel / Spatola premium invertita / Espátula de primera invertida / Espátula Premium invertida / Geinverteerde premium spatel / Inverterad premium spatel / Omvendt premium spatel / Taitettu ensiluokkainen lasta / Ανάστροφη σπάτουλα Premium / Odwrócona łopatka Premium / Ters çevrilmiş Özel Spatula / Лопатообразная (шпатель), обратная
▭	Multi-Purpose / Multi usage / Mehrzweck / Multi-scopo / Multiusos / Multi-uso / Voor verschillende doeleinden / Multibruk / Universal / Monikäyttöinen / Πολλών χρήσεων / Universalne / Çok Amaçlı / Многоцелевая
⊙	Diamond Point / Pointe en losange / Diamantspitze / Punto diamante / Punta de diamante / Ponta de diamante / Diamantpunt / Diamantspets / Diamantspids / Kulmikas kärki / Ρομβοειδής αιχμή / Końcówka w kształcie rombu / Elmas Uç / Салмазым наконечником
⊙	X-Cosmetic Cutting / Découpe cosmétique en X / X-Kosmetik-Schnitt / Taglio X-cosmetico / Corte cosmético X / Corte estético em X / X-cosmetisch snijden / X-kosmetisk skärande / X-kosmetisk skæring / X-kosmeetinen leikkaus / X-Καλλυντική κοπή / Cięcie kosmetyczne X / Düzgün Kesim / Режущая косметическая (X-Cosmetic)
⊙	Loop / Boucle / Schlaufe / Occhiello / Buclé / Laço / Lus / Øgla / Løkke / Silmukka / Βρόχος / Petla / Spiral / Петля
D-Tach	Removable Needles / Aiguilles amovibles / Abnehmbare Nadeln / Aghi Rimovibili / Agulhas extraíveis / Agulhas Removíveis / Verwijderbare naald / Avtagbar nål / Aftagelig nål / Irrtøtteta neula / Αφαιρούμενη βελόνα / Wymiennalna igła / Çıkarılabilir iğne / Съёмная игла

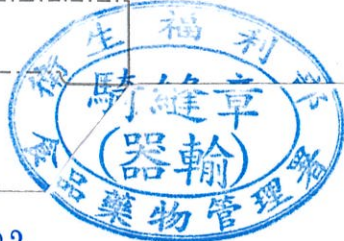

107. 2. 23

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

107. 2. 23



Product Information enclosed



Maxon™

Monofilament Polyglyconate Synthetic Absorbable Suture
 Suture synthétique résorbable monofilament en polyglyconate
 Synthetisches resorbierbares monofiles Nahtmaterial aus Polyglykonat
 Sutura riassorbibile sintetica in poligliconato monofilamento
 Sutura reabsorbible sintética de poligliconato monofilamento
 Sutura Absorvível Sintética e Monofilamentosa de Poligliconato
 Synthetisch, absorbeerbaar monofilamenthechtdraad van polyglyconaat
 Monofil syntetisk resorberbar polyglykonatsutur
 Syntetisk resorberbar polyglyconatmonofilamentsutur
 Yksisäikeinen synteettinen resorboituva polyglykonaattiomelaine
 Μονόκλωνο, Πολυγλυκονικό, Συνθετικό, Απορροφήσιμο Ράμμα
 Monofilamentowe wchłaniające syntetyczne nici chirurgiczne z poliglikonianu
 Monofilament, Poliglikonat, Sentetik, Emilebilir Dikiş İpliği
 Рассасывающийся синтетический монофиламентный шовный материал из полигликоната

Monofilamentní polyglykonátový syntetický vstřebatelný šicí materiál
 Egyszálás poliglikonát szintetikus felszívódó fonalak
 Monofilamentné polyglykonátové syntetické vstřebateľné nite
 Monofilament polyglykonat syntetisk absorberbar sutur
 Monofilamentna sintetična vpojna sutura iz poliglikonata
 单纤维聚甘醇碳酸可吸收合成缝合线
 單絲聚甘醇碳酸合成可吸收縫合線
 단섬유 폴리글리코네이트 합성 흡수성 봉합사
 Синтетичен едноклишков абсорбируем хирургически конец от полигликонат
 Sutura sintetică absorbabilă din poligliconat cu monofilament
 Monofilamentne poliglikonaadist resorbeeruv sünteetiline õmblusmaterjal
 Viendzīslas poliglikonāta sintētiska absorbējama šuve
 Monofilamentni poliglikonatni sintetički apsorbirajući kirurški konac
 Monofilamentni poliglikonatni sintetički resorptivni konac
 Vienagijis poliglikonato sintetinis absorbuojamasis siūlas

CLEAR / INCOLORE / KLAAR / INCOLORE / CLARO / INCOLORE / HELDER / GEWONSKINLIC / KLAAR / KIRKAS / ДИФОНІЗ / PRZETRO CZYSTY / SEITNE / ПРОЗРАЧНАЯ / СІРА / ATLASZDÓ / СІРА / BLANK / PROZORNĚN / 白色 / 透明 / 맑은 / ЧИСТО / TRANSPARENT / LABYRANTEV / SAUSPĪDĪGS / PROZIRNO / ВЕРЗОВИ / РЕМАТОНА / GREEN / VERTE / GRÜN / VERDE / VERDE / GROEN / GROEN / VĪNERĀ / ПРАЏИНО / ZIELONY / YESIL / ZELENAJA / ZELENA / ZOLID / ZELENA / GRÖNN / ZELEN / 綠色 / 綠色 / 녹색 / ЗЕЛЕН ЦВІТ / VERDE / ROHLINE / ZŤAS / ZELENO / ZELEN / ZALIA

Syneture™

STERILE EO



Single use

Rx ONLY



Do not sterilize



Do not use if package is opened or damaged



Caution, consult accompanying documents



Upper temperature limit



Made from 100% recycled fibres. Minimum 35% post-consumer content.

CE 0123

U.S. Patent 5,860,517

© 2011 Covidien. Made in USA.

Covidien Inc., 15 Hanover Street, Mansfield, MA 02048 USA.

Covidien Ireland Limited, PO Business & Technology Park, Lullmore.

www.covidien.com

Maxon™ sutures are USP/EP except for diameter.




(991) 1303379 1303379

福利部
縫章
器輸
物

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	"柯惠"舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)	申請廠商	美敦力醫療產品股份有限公司
--------	-----------------------	------	---------------

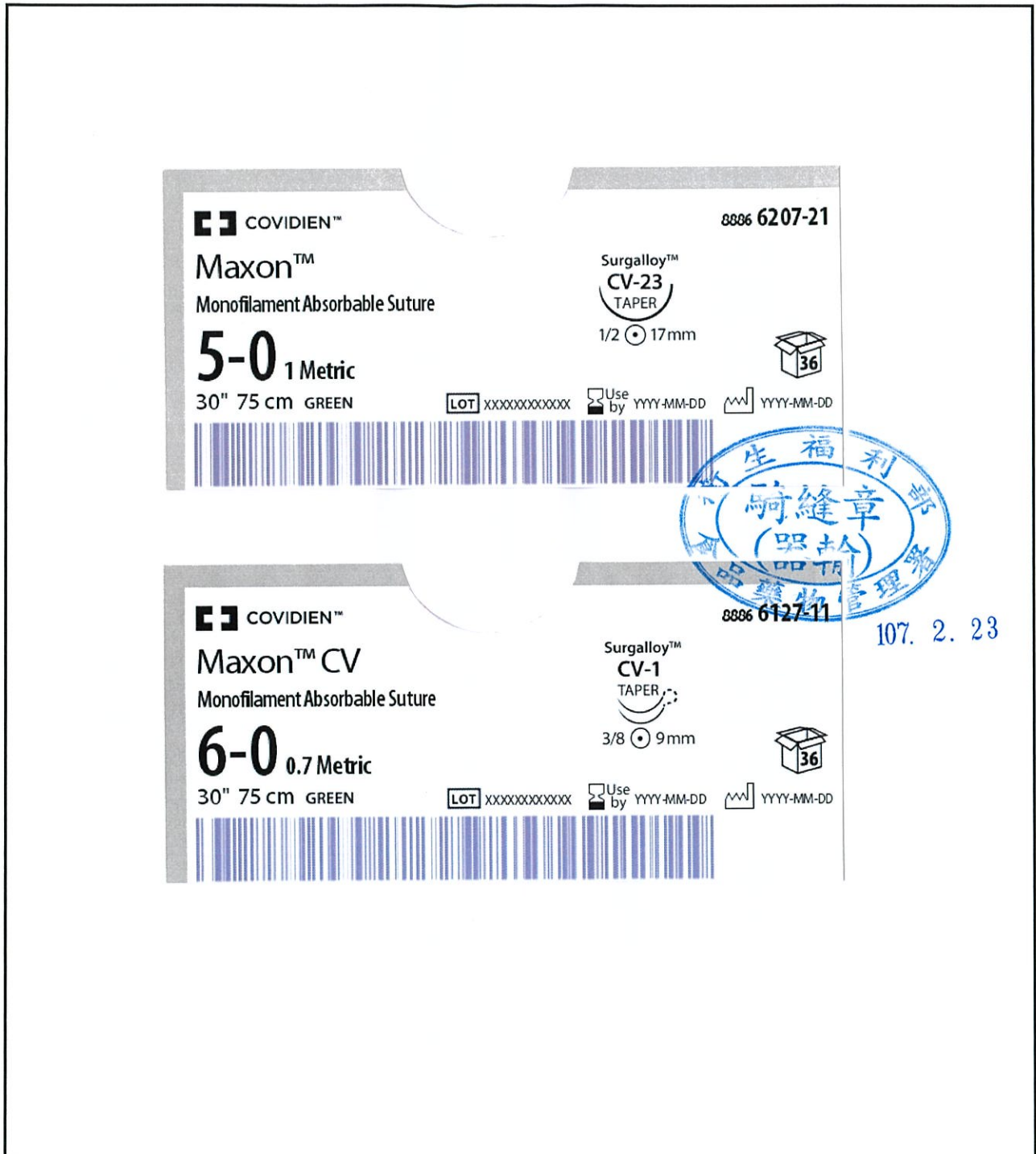

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	"柯惠"舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)	申請廠商	美敦力醫療產品股份有限公司
--------	-----------------------	------	---------------

COVIDIEN™
Maxon™
Monofilament Absorbable Suture
5-0 1 Metric
30" 75 cm
GREEN / VERTE /
GRÜN / VERDE

8886 6207-21

Surgalloy™
CV-23
TAPER
1/2 ⌀ 17mm

LOT XXXXXXXXXXXX Use by YYYY-MM-DD

5-0 6207-21
CV-23

COVIDIEN™
Maxon™ CV
Monofilament Absorbable Suture
6-0 0.7 Metric
30" 75 cm
GREEN / VERTE /
GRÜN / VERDE

8886 6127-11

Surgalloy™
CV-1
TAPER
3/8 ⌀ 9mm

LOT XXXXXXXXXXXX Use by YYYY-MM-DD

6-0 6127-11
CV-1

衛生福利部
醫事司
醫療器材管理處
藥品藥物管理署

Monofilament Polyglyconate
Polyglyconate monofil
Monofiles Polyglykonat
Poligliconato in monofilamento
Monofilamento de poligliconato
Poligliconato monofilamentoso
Synthetic Absorbable Suture
Suture synthétique résorbable
Resorbierbares Synthetik-Nahtmaterial
Sutura sintetica assorbibile
Sutura absorvível sintética
Sutura absorbible sintética
Maxon™ sutures meet USP/EP
except for diameter.
Syneture™

STERILE EO
Single use Caution, consult
accompanying documents

CE 0123
(01) XXXXXXXXXXXXXXXX
(17) XXXXXX
(10) XXXXXXXXXXXXXXXX

LOT XXXXXXXXXXXX
Use by YYYY-MM-DD

REF 8886620721

Monofilament Polyglyconate
Polyglyconate monofil
Monofiles Polyglykonat
Poligliconato in monofilamento
Monofilamento de poligliconato
Poligliconato monofilamentoso
Synthetic Absorbable Suture
Suture synthétique résorbable
Resorbierbares Synthetik-Nahtmaterial
Sutura sintetica absorbibile
Sutura absorvível sintética
Sutura absorbible sintética
Maxon™ sutures meet USP/EP
except for diameter.
Syneture™

STERILE EO
Single use Caution, consult
accompanying documents

CE 0123
(01) XXXXXXXXXXXXXXXX
(17) XXXXXX
(10) XXXXXXXXXXXXXXXX

LOT XXXXXXXXXXXX
Use by YYYY-MM-DD

REF 8886612711

- ※ 裝訂原廠之仿單、
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、副作用(副作用)、產用說明及注意事項可敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

" 柯惠 " 舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)

" Covidien " Syneture MAXON Monofilament Polyglyconate Synthetic Absorbable Suture

衛署醫器輸字第 019552 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

產品敘述

本產品是由甘醇酸和三亞甲基碳酸鹽的共聚合物所組成；以 D&C Green No. 6 染色提高手術時的能見度，或無色(未染色)。

除了縫線直徑有些細微差異外，本產品符合美國藥典和歐洲藥典於合成可吸收外科縫線的標準。這些差異如下：

美國藥典與歐洲藥典縫線直徑最大增量(mm)		
USP 尺寸	USP 指定尺寸(mm)	最大增量(mm)
7-0	0.05-0.069	0.015
6-0	0.07-0.099	0.025
5-0	0.10-0.149	0.035
4-0	0.15-0.199	0.040
3-0	0.20-0.249	0.055
2-0	0.30-0.339	0.055
0	0.35-0.399	0.070
1	0.40-0.499	0.070

適應症

本產品作為可吸收縫線，適用於一般軟組織的縫合和/或結紮，包括使用於兒童心臟血管組織(預期會有組織生長)及週邊血管組織。

本產品不適用於成人心血管組織、眼科手術、顯微手術、及神經組織。

作用

本產品會引起組織的輕微急性發炎反應，用於體內後會逐漸被纖維結締組織包覆。藉由縫線於體內水解分解，隨後被身體吸收及代謝，本產品的張力強度會逐漸降低且最終被吸收。

研究顯示，在植入後一週，本產品的張力強度大約為原縫線強度的 80%。第二週大約保留原縫線強度的 75%，第三週大約保留 65%，第四週後大約保留 50%，第六週大約保留 25%。直到植入後約 60 天，本產品的吸收極微。吸收大致於六個月內完成。

禁忌症

請勿使用本產品於對其成分敏感或過敏之病患。

本產品為可吸收，請勿使用於組織需要長期縫合的部位，或使用於固定永久性心臟血管修補或合成的植入物。

警告

請勿重複滅菌。除非包裝被打開或毀損，本產品為無菌狀態。請丟棄未使用但已打開的縫線。請存放在室溫下。避免長時間存放在高溫環境。

在泌尿道和膽道手術中，請避免本產品或任何縫線與鹽溶液長時間接觸，因為可能會導致結石形成。

使用本產品縫合傷口之前，使用者應熟悉有關可吸收性縫線的手術程序和技術，因為傷口裂開的風險會因為縫合部

位和使用的縫線材料而有所不同。

有關受感染或受污染傷口的引流和閉合，務必遵循合適的手術規範。

如果外科醫生認為病患罹患任何可能導致或促使傷口癒合延緩的疾病，則可能不適合使用本產品。

如果縫合部位擴張、伸長或膨脹，或者需要額外支撐，外科醫生應考量對該部位補充使用不可吸收的縫線。

注意事項

在某些情況下，尤其是在矯形手術中，外科醫生可以考量使用外部支撐物進行固定。

取用本產品或其他任何縫線材料時，應謹慎小心以避免損壞。請避免因使用手術器械(如：鑷子或持針器)而造成縫線被壓壞或起皺之損壞。

適當的結節牢固度需要合格的平結及方結外科技術，並根據手術環境及外科醫生的經驗增加線結數量。

在使用單股縫線打結時，可能需增加線結數量。以確保結節的穩固。

進行大範圍的連續縫合或腹部分層縫合時，應謹慎打結縫合線，即連續縫合的兩端都應打上不會滑脫的結。

連續縫合完畢打結時，常用的線結(looped-to-stand knot)有可能會引起滑動。請謹慎小心，確保打出多個方結固定。

長期留在陰道黏膜或皮膚中的縫線可能會引起局部發炎。出現此症狀時，應按照說明去除縫線。

由於存在細菌污染的任何異物都可能增強細菌感染性，有關受感染傷口的引流和閉合，務必遵循合適的手術規範。請按照醫院標準程序和一般生物危險廢棄物預防措施，來處理被污染的縫線和包裝材料。

不良反應

可能與使用本產品相關的不良反應包括：傷口裂開；某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐；或病患罹患可能延緩傷口癒合的疾病，無法對傷口提供足夠的支撐；組織肉芽化或纖維化；傷口化膿和出血；形成靜脈竇；如果皮膚縫線保留7天或7天以上，會出現局部發炎；長期接觸鹽液會導致結石形成；增加細菌感染的機會；輕微急性組織發炎反應；疼痛；浮腫；傷口部位出現紅斑。

如何供應

本產品縫線供應尺寸為 USP 線徑 1 號(EP 線徑公制 4)到 USP 線徑 7-0 號(EP 線徑公制 0.5)。本產品 CV 系列縫線(Maxon CV)供應尺寸僅有 USP 線徑 4-0 號(EP 線徑公制 1.5)到 USP 線徑 7-0 號(EP 線徑公制 0.5)。本產品(Maxon 及 Maxon CV)以 D&C Green No.6 染色，本產品(Maxon)亦有無色(未染色)的縫線。本產品的供應方式為無菌，長度預先裁剪，不帶針或以永久的或可移除的固定技術固定於各式針體。本產品有每盒 12、24、及 36 包裝。



如包裝為開放或毀損狀態，請勿使用。









STERILE EO (本產品經環氧乙烷滅菌)

產品有效期間：5 年。


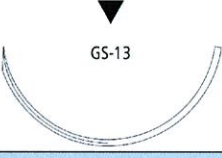






型號規格表


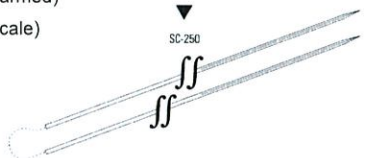







NON NEEDED - PRE-CUT								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
PRE-CUT	3-0	2	45	GREEN	36	3 strands per pouch	88866007-41	6007-41
	2-0	3	45	GREEN	36	3 strands per pouch	88866007-51	6007-51
	0	3.5	45	GREEN	12	5 strands per pouch	88866015-63	6015-63
REVERSE CUTTING								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
C-1 3/8 CIRCLE 12mm 	5-0	1	45	GREEN	36		88866605-21	6605-21
	4-0	1.5	45	GREEN	36		88866605-31	6605-31
C-12 3/8 CIRCLE 16mm 	4-0	1.5	75	CLEAR	36		88866118-31	6118-31

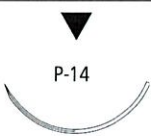






REVERSE CUTTING

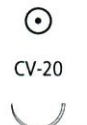敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
C-13 3/8 CIRCLE 19mm 	5-0	1	45	CLEAR	36		88866608-21	6608-21
	4-0	1.5	45	CLEAR	36		88866608-31	6608-31
	4-0	1.5	75	CLEAR	36		88866612-31	6612-31
	4-0	1.5	75	GREEN	36		88866639-31	6639-31
	3-0	2	45	CLEAR	36		88866608-41	6608-41
	3-0	2	75	CLEAR	36		88866612-41	6612-41
	3-0	2	75	GREEN	36		88866639-41	6639-41
C-14 3/8 CIRCLE 24mm 	4-0	1.5	75	CLEAR	36		88866618-31	6618-31
	3-0	2	75	GREEN	36		88866641-41	6641-41
	3-0	2	75	CLEAR	36		88866618-41	6618-41
	2-0	3	75	GREEN	36		88866641-51	6641-51
	2-0	3	75	CLEAR	36		88866618-51	6618-51
C-16 3/8 CIRCLE 30mm 	2-0	3	75	CLEAR	36		88866626-51	6626-51
C-27 1/2 CIRCLE 20mm 	3-0	2	45	GREEN	36		88866059-41	6059-41
GS-10 1/2 CIRCLE 26mm 	3-0	2	75	CLEAR	36		88866744-41	6744-41
	2-0	3	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	CMM-435-MG	
	2-0	3	75	CLEAR	36		88866744-51	6744-51
	2-0	3	75	GREEN	36		88866745-51	6745-51
HOS-10 1/2 CIRCLE 26mm 	1	4	75	GREEN	36		88866751-71	6751-71
GS-11 1/2 CIRCLE 37mm 	2-0	3	75	GREEN	36		88866755-51	6755-51
	0	3.5	75	GREEN	36		88866755-61	6755-61
	1	4	75	GREEN	36		88866755-71	6755-71
HOS-11 1/2 CIRCLE 37mm 	1	4	75	GREEN	36		88866757-71	6757-71





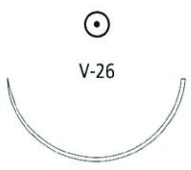


11



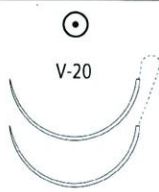



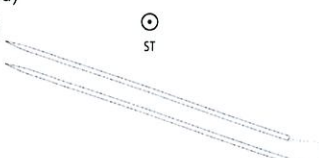

REVERSE CUTTING								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
HOS-12 1/2 CIRCLE 40mm 	1	4	75	GREEN	36		88866787-71	6787-71
GS-13 1/2 CIRCLE 48mm (Not to scale) 	1	4	90	GREEN	36		88866769-71	6769-71
PREMIUM REVERSE CUTTING								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
P-10 3/8 CIRCLE 11mm 	6-0	0.7	45	CLEAR	36		88866532-11	6532-11
	6-0	0.7	45	GREEN	36		88866533-11	6533-11
	5-0	1	45	CLEAR	36		88866532-21	6532-21
P-13 3/8 CIRCLE 13mm 	6-0	0.7	45	CLEAR	36		SMM-5516	
	5-0	1	45	CLEAR	36		SMM-5526	
	4-0	1.5	45	CLEAR	36		SMM-5536	
P-11 3/8 CIRCLE 16mm 	5-0	1	45	CLEAR	36		SMM-5221	
	4-0	1.5	45	CLEAR	36		SMM-5431	
P-12 3/8 CIRCLE 19mm 	5-0	1	45	CLEAR	36		SMM-5042	
	4-0	1.5	45	GREEN	36		SMM-5033	
	4-0	1.5	45	CLEAR	36		SMM-5043	
	4-0	1.5	75	CLEAR	36		SMM-5323	
	3-0	2	45	CLEAR	36		SMM-5044	
	3-0	2	75	CLEAR	36		88866632-41	6632-41
P-14 3/8 CIRCLE 24mm 	3-0	2	45	CLEAR	36		SMM-5241	
	2-0	3	45	CLEAR	36		88866624-51	6624-51
P-24 1/2 CIRCLE 16mm 	4-0	1.5	45	CLEAR	36		SMM-5831	






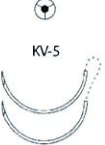


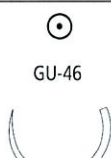

CUTTING								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
SC-2 STRAIGHT 60mm (Not to scale) 	4-0	1.5	75	CLEAR	36		88866908-31	6908-31
	3-0	2	75	CLEAR	36		88866908-41	6908-41
SC-250 - SC-250 STRAIGHT 254mm (Double armed) (Not to scale) 	2-0	3	75	GREEN	12		88866390-53	6390-53
TAPER POINT								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
CV-1 - CV-1 3/8 CIRCLE 9mm (Double armed) 	7-0	0.5	45	GREEN	36		88866145-01	6145-01
	7-0	0.5	60	GREEN	36		88866139-01	6139-01
	7-0	0.5	75	GREEN	36		88866127-01	6127-01
	6-0	0.7	60	GREEN	36		88866139-11	6139-11
	6-0	0.7	75	GREEN	36		88866127-11	6127-11
CV - CV 3/8 CIRCLE 11mm (Double armed) 	6-0	0.7	45	GREEN	36		88866115-11	6115-11
CV-11 3/8 CIRCLE 13mm 	6-0	0.7	75	GREEN	36		88866148-11	6148-11
	5-0	1	75	GREEN	36		88866148-21	6148-21
CV-11 - CV-11 3/8 CIRCLE 13mm (Double armed) 	6-0	0.7	45	GREEN	36		88866121-11	6121-11
	6-0	0.7	60	GREEN	36		88866147-11	6147-11
	6-0	0.7	75	GREEN	36		88866124-11	6124-11
	5-0	1	60	GREEN	12	4 strands per pouch	88866165-23	6165-23
	5-0	1	60	GREEN	36		88866147-21	6147-21
	5-0	1	75	GREEN	36		88866124-21	6124-21
CV-15 3/8 CIRCLE 17mm 	4-0	1.5	75	GREEN	36		88866057-31	6057-31
CV-15 - CV-15 3/8 CIRCLE 17mm (Double armed) 	5-0	1	75	GREEN	36		88866462-21	6462-21
	4-0	1.5	75	GREEN	36		88866462-31	6462-31
CV-20 1/2 CIRCLE 10mm 	6-0	0.7	75	GREEN	36		88866001-11	6001-11










TAPER POINT								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
CV-22 1/2 CIRCLE 13mm 	6-0	0.7	75	GREEN	36		88866213-11	6213-11
	5-0	1	75	GREEN	36		88866213-21	6213-21
	4-0	1.5	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866201-33	6201-33
	4-0	1.5	75	GREEN	36		88866213-31	6213-31
CV-22 - CV-22 1/2 CIRCLE 13mm (Double armed) 	6-0	0.7	75	GREEN	36		88866132-11	6132-11
	5-0	1	75	GREEN	36		88866122-21	6122-21
CV-23 1/2 CIRCLE 17mm 	5-0	1	75	GREEN	36		88866207-21	6207-21
	4-0	1.5	75	GREEN	36		88866207-31	6207-31
	3-0	2	75	GREEN	36		88866207-41	6207-41
CV-23 - CV-23 1/2 CIRCLE 17mm (Double armed) 	5-0	1	75	GREEN	36		88866149-21	6149-21
	4-0	1.5	90	GREEN	36		88866134-31	6134-31
CV-24 1/2 CIRCLE 20mm 	5-0	1	75	GREEN	36		88866217-21	6217-21
	4-0	1.5	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866219-33	6219-33
	4-0	1.5	75	GREEN	36		88866217-31	6217-31
	3-0	2	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866219-43	6219-43
	3-0	2	75	GREEN	36		88866217-41	6217-41
CV-24 - CV-24 1/2 CIRCLE 20mm (Double armed) 	4-0	1.5	90	GREEN	36		88866221-31	6221-31
	3-0	2	90	GREEN	36		88866036-41	6036-41
V-20 1/2 CIRCLE 26mm 	4-0	1.5	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866229-33	6229-33
	4-0	1.5	75	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866034-33	6034-33
	4-0	1.5	75	GREEN	36		88866233-31	6233-31
	3-0	2	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866229-43	6229-43
	3-0	2	75	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866034-43	6034-43
	3-0	2	75	CLEAR	36		88866232-41	6232-41
	3-0	2	75	GREEN	36		88866233-41	6233-41
	2-0	3	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866229-53	6229-53
	2-0	3	75	GREEN	36		88866233-51	6233-51

TAPER POINT

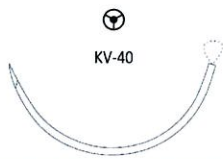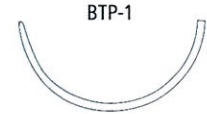
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼	
V-20 - V-20 1/2 CIRCLE 26mm (Double armed)		4-0	1.5	75	GREEN	36		88866231-31	6231-31
		4-0	1.5	90	GREEN	36		88866235-31	6235-31
		4-0	1.5	105	GREEN	36		88866143-31	6143-31
		3-0	2	90	GREEN	36		88866235-41	6235-41
GS-22 1/2 CIRCLE 27mm		3-0	2	75	GREEN	36		88866245-41	6245-41
		2-0	3	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866247-53	6247-53
		2-0	3	75	GREEN	36		88866245-51	6245-51
		0	3.5	75	GREEN	36		88866245-61	6245-61
		1	4	75	GREEN	36		88866245-71	6245-71
V-30 1/2 CIRCLE 30mm		4-0	1.5	75	GREEN	36		88866261-31	6261-31
		3-0	2	75	GREEN	36		88866261-41	6261-41
		2-0	3	75	GREEN	36		88866261-51	6261-51
		0	3.5	75	GREEN	36		88866261-61	6261-61
GS-21 1/2 CIRCLE 37mm		3-0	2	75	GREEN	36		88866267-41	6267-41
		2-0	3	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866275-53	6275-53
		2-0	3	75	GREEN	36		88866267-51	6267-51
		2-0	3	90	GREEN	36		88866269-51	6269-51
		2-0	3	150	GREEN	12		GMM-951	
		0	3.5	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866275-63	6275-63
		0	3.5	75	GREEN	36		88866267-61	6267-61
		0	3.5	90	GREEN	36		88866269-61	6269-61
		1	4	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866275-73	6275-73
		1	4	75	GREEN	36		88866267-71	6267-71
		1	4	90	GREEN	36		88866269-71	6269-71
		V-26 1/2 CIRCLE 37mm		3-0	2	75	GREEN	36	
2-0	3			75	GREEN	36		88866257-51	6257-51
0	3.5			75	GREEN	36		88866257-61	6257-61
GS-24 1/2 CIRCLE 40mm		2-0	3	90	GREEN	36		88866287-51	6287-51
		0	3.5	75	GREEN	36		88866285-61	6285-61
		0	3.5	90	GREEN	36		88866287-61	6287-61
		1	4	75	GREEN	36		88866285-71	6285-71
		1	4	90	GREEN	36		88866287-71	6287-71
GS-24 LOOP 1/2 CIRCLE 40mm		0	3.5	150	GREEN	12	LOOP	GMM-563L	
		1	4	150	GREEN	12	LOOP	GMM-573L	

TAPER POINT								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
GS-25 1/2 CIRCLE 48mm (Not to scale) 	0	3.5	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866311-63	6311-63
	0	3.5	90	GREEN	36		88866307-61	6307-61
	1	4	45	GREEN	12	5 strands per pouch , D-Tach	88866311-73	6311-73
	1	4	90	GREEN	36		88866307-71	6307-71
	1	4	150	GREEN	24		88866309-72	6309-72
GS-25 LOOP 1/2 CIRCLE 48mm (Not to scale) 	0	3.5	150	GREEN	12	LOOP	GMM-634L	
	1	4	150	GREEN	12	LOOP	GMM-632L	
GS-26 1/2 CIRCLE 65mm (Not to scale) 	0	3.5	150	GREEN	24		88866319-62	6319-62
	1	4	100	GREEN	36		88866322-71	6322-71
	1	4	150	GREEN	24		88866319-72	6319-72
GS-26 LOOP 1/2 CIRCLE 65mm (Not to scale) 	0	3.5	150	GREEN	12	LOOP	GMM-341L	
	0	3.5	240	GREEN	12	LOOP	GMM-343L	
	1	4	240	GREEN	12	LOOP	GMM-344L	
GU-46 5/8 CIRCLE 27mm 	2-0	3	75	GREEN	36		88866403-51	6403-51
GU-46 - GU-46 5/8 CIRCLE 27mm (Double armed) 	2-0	3	75	GREEN	36		88866404-51	6404-51
ST - ST STRAIGHT 60mm (Double armed) (Not to scale) 	3-0	2	75	GREEN	36		88866237-41	6237-41
	0	3.5	75	GREEN	36		88866237-61	6237-61
HEAVY TAPER POINT								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
HGS-22 1/2 CIRCLE 27mm 	0	3.5	75	GREEN	36		88866249-61	6249-61

HEAVY TAPER POINT								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
HGS-21 1/2 CIRCLE 37mm 	0	3.5	90	GREEN	36		88866339-61	6339-61
	1	4	90	GREEN	36		88866339-71	6339-71
HGU-46 5/8 CIRCLE 27mm 	0	3.5	45	GREEN	36		88866455-61	6455-61
	0	3.5	75	GREEN	36		88866456-61	6456-61
	1	4	75	GREEN	36		88866419-71	6419-71
TAPERCUTTING								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
KV-1 3/8 CIRCLE 9mm 	6-0	0.7	75	GREEN	36		88866768-11	6768-11
KV-11 3/8 CIRCLE 13mm 	6-0	0.7	75	GREEN	36		88866297-11	6297-11
	5-0	1	75	GREEN	36		88866297-21	6297-21
KV-11 - KV-11 3/8 CIRCLE 13mm (Double armed) 	6-0	0.7	75	GREEN	36		88866288-11	6288-11
	5-0	1	75	GREEN	36		88866288-21	6288-21
KV-5 - KV-5 1/2 CIRCLE 17mm (Double armed) 	4-0	1.5	90	GREEN	36		VMM-137	
KV-7 1/2 CIRCLE 26mm 	2-0	3	75	GREEN	36		88866292-51	6292-51
KV-34 1/2 CIRCLE 37mm 	0	3.5	90	GREEN	36		88866277-61	6277-61
	1	4	90	GREEN	36		88866277-71	6277-71
KV-37 LOOP 1/2 CIRCLE 40mm 	1	4	150	GREEN	12	LOOP	GMM-873L	
KV-40 1/2 CIRCLE 48mm (Not to scale) 	1	4	90	GREEN	36		88866295-71	6295-71

TAPERCUTTING								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
KV-40 LOOP 1/2 CIRCLE 48mm (Not to scale) 	0	3.5	150	GREEN	12	LOOP	GMM-806L	
	1	4	150	GREEN	12	LOOP	GMM-807L	
BLUNT TAPER POINT								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
BTP-1 1/2 CIRCLE 37mm 	2-0	3	90	GREEN	36	Protect Point	GMMT-951	
	0	3.5	45	GREEN	12	5 strands per pouch, D-Tach, Protect Point	GMMT-563-MG	
	0	3.5	90	GREEN	36	Protect Point	GMMT-961	
BGS-25 1/2 CIRCLE 48mm (Not to scale) 	0	3.5	90	GREEN	12	Protect Point	88866061-63	6061-63
	1	4	90	GREEN	12	Protect Point	88866061-73	6061-73
BTP-X 1/2 CIRCLE 48mm (Not to scale) 	0	3.5	45	GREEN	12	5 strands per pouch, D-Tach, Protect Point	GMMT-541-MG	
	1	4	45	GREEN	12	5 strands per pouch, D-Tach, Protect Point	GMMT-540-MG	
BTP-X LOOP 1/2 CIRCLE 48mm (Not to scale) 	0	3.5	150	GREEN	12	LOOP, Protect Point	GMMT-89L	
	1	4	150	GREEN	12	LOOP, Protect Point	GMMT-90L	
BGS-29 1/2 CIRCLE 65mm (Not to scale) 	1	4	150	GREEN	12	Protect Point	88866067-73	6067-73
BGST-29 LOOP 1/2 CIRCLE 65mm (Not to scale) 	1	4	240	GREEN	12	LOOP, Protect Point	GMMT-690-L	
MULTIPURPOSE								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
5.65 LOOP 5/8 CIRCLE 65mm (Not to scale) 	0	3.5	150	GREEN	12	LOOP	GMM-496L	
	1	4	180	GREEN	12	LOOP	GMM-497L	
DIAMOND POINT								
敘述	USP 線徑	EP 線徑	線長(cm)	線體顏色	包裝	備註	產品型號	簡碼
DGE-6 3/8 CIRCLE 8mm 	7-0	0.5	45	GREEN	36		88866628-01	6628-01

如何閱讀縫線產品標籤資訊

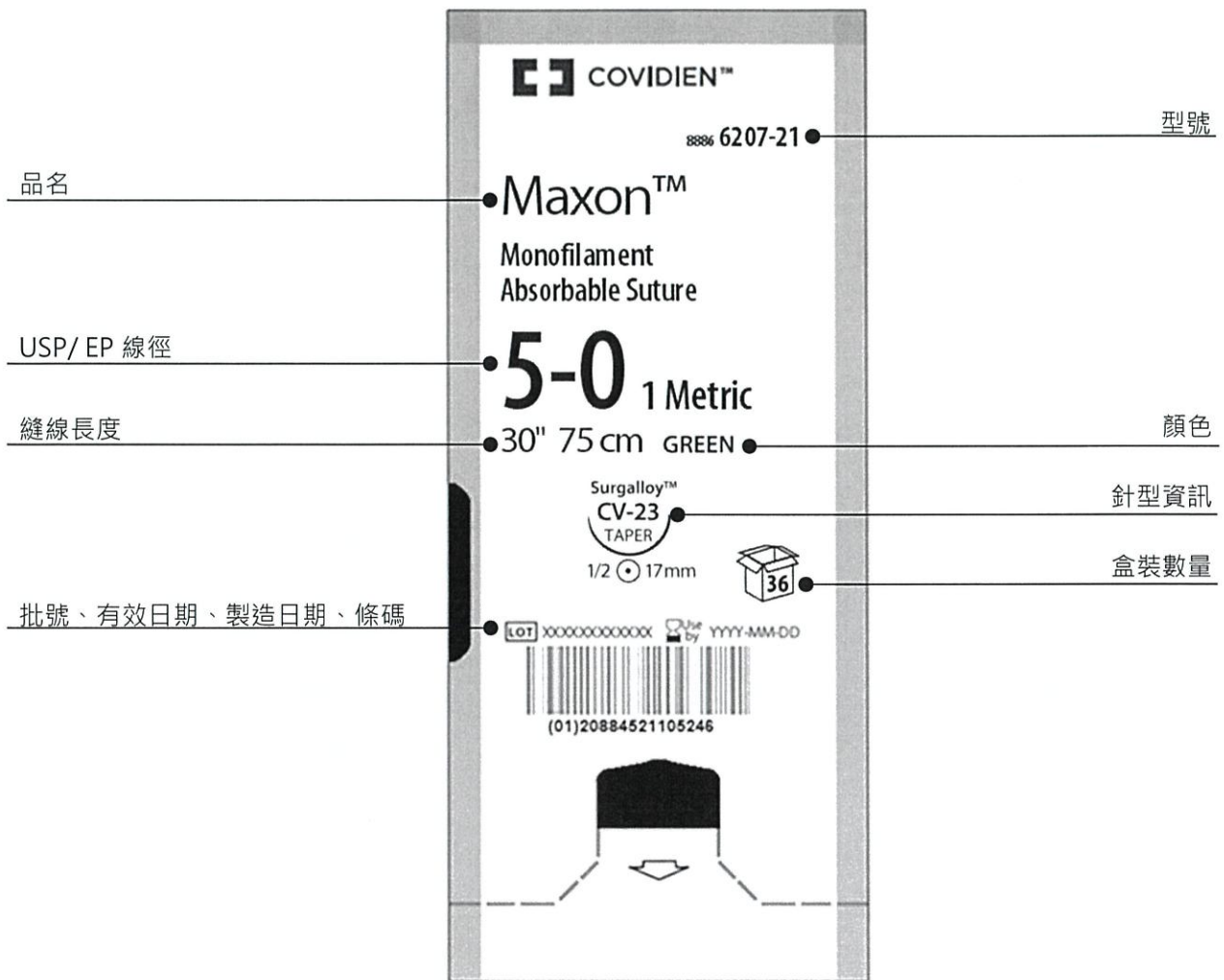

製造廠名稱：(O)COVIDIEN LLC
(P)COVIDIEN

製造廠地址：(O)15 HAMPSHIRE STREET MANSFIELD, MA 02048 USA
(P)60 MIDDLETOWN AVENUE, NORTH HAVEN, CONNECTICUT 06473, U.S.A.


藥商名稱：美敦力醫療產品股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載


實體照片

產品名稱："柯惠"舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)

未染色·單針


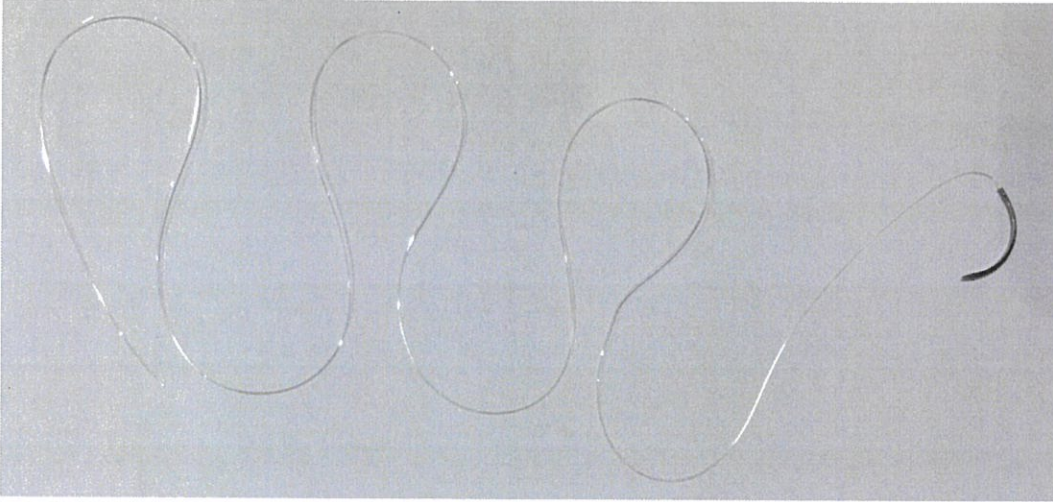


綠色·雙針

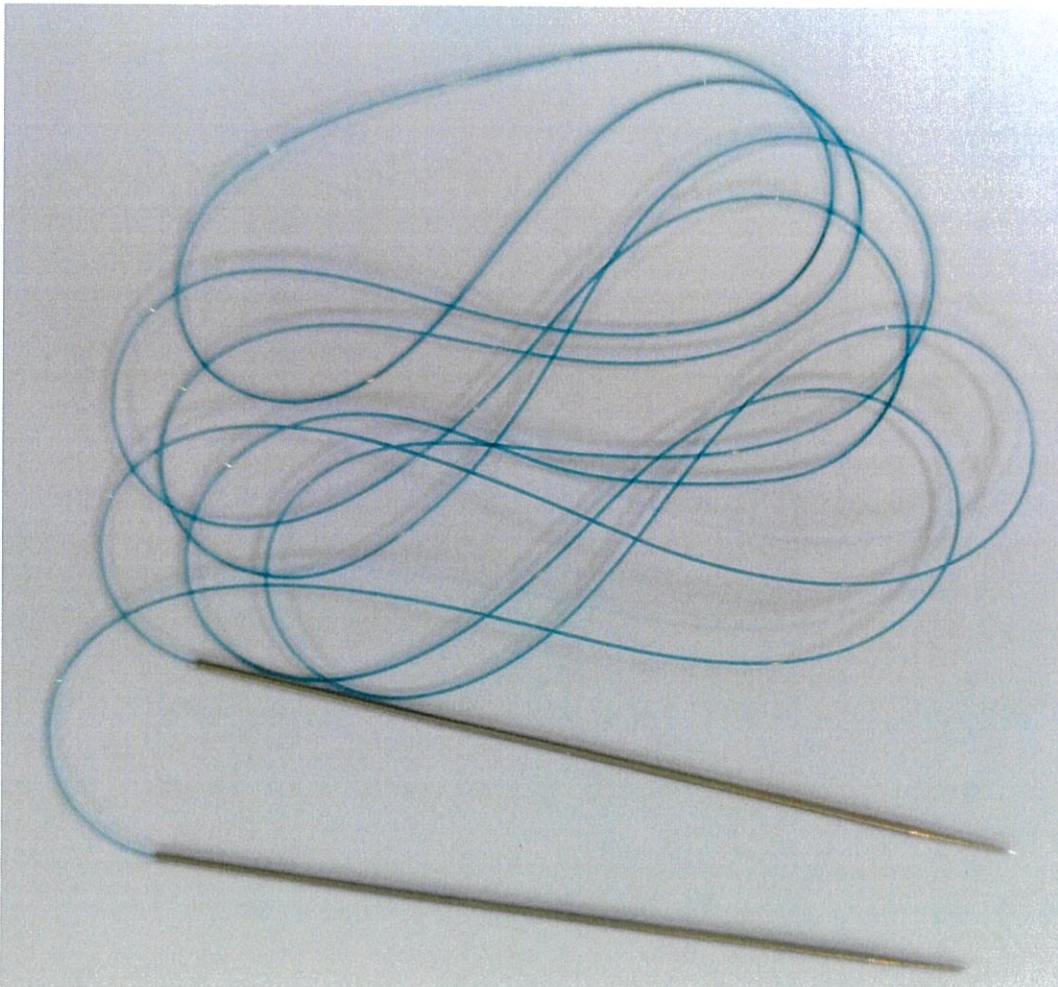

實體照片

產品名稱："柯惠"舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)

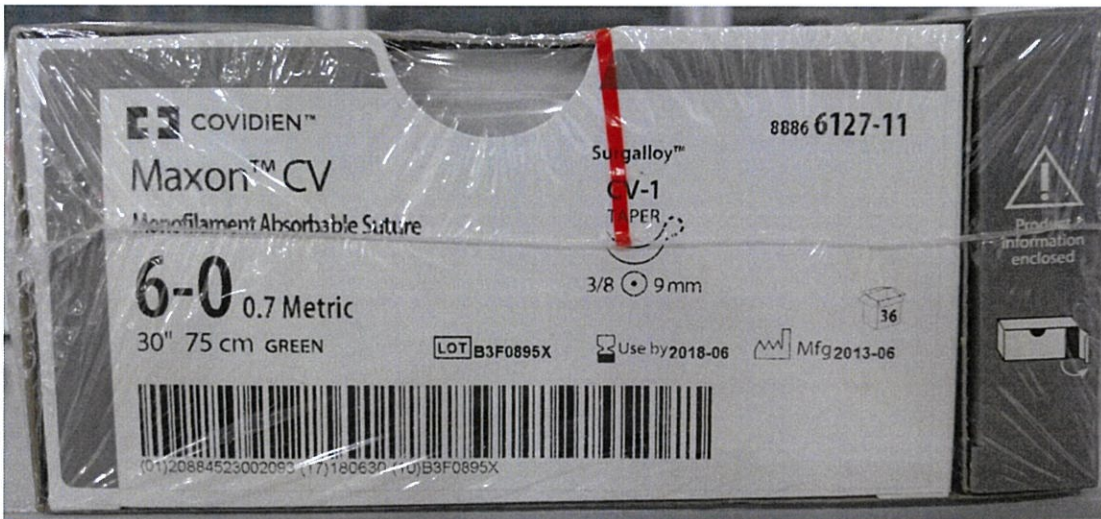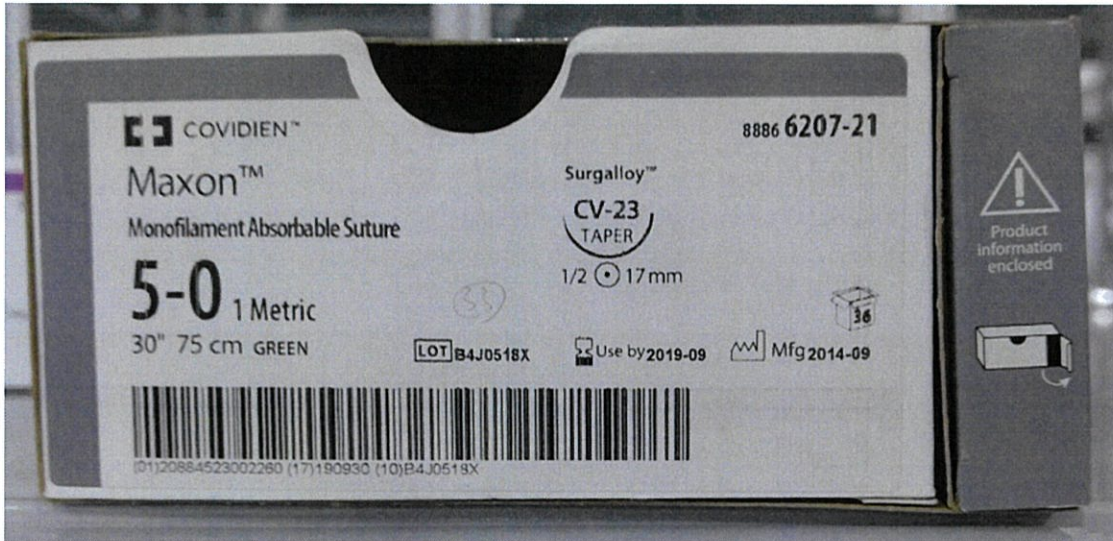

實體照片

產品名稱："柯惠"舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)



實體照片

產品名稱："柯惠"舒耐久麥克森縫合線(附針/不附針)

