

“思泰瑞” S40 過醋酸濃縮滅菌劑
“STERIS” S40 Sterilant Concentrate

衛署醫器輸字第 024902 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

- **型號：**S4001
- **產品敘述：**

本產品容器內裝液體狀活性成分(35%過醋酸)以及粉末狀惰性成分。可殺孢菌、真菌、細菌、病毒及結核菌。
- **用途：**

本產品是單次使用的化學品，僅適用於“思泰瑞” SYSTEM 1 EXPRESS 及 SYSTEM 1 PLUS 滅菌處理系統。用來滅菌處理已清潔的醫院、醫學/外科門診和辦公室裡可浸泡、可重複使用的關鍵和半關鍵性的醫療器材，包含內視鏡及其附件。
- **使用說明：**
 1. 謹慎檢查滅菌劑外包裝有無損壞異狀。假若滅菌劑外盒受損，請勿使用外盒有損壞的滅菌劑；關於杯子外漏、損壞或過期的棄置處理方式，請參照滅菌處理系統的操作說明。
 2. 確認產品仍在製造廠的有效期限內。超過盒外印製的製造廠有效期限，請勿使用。
 3. 請著適時的個人防護設備(PPE)，循撕開壓痕打開紙盒，取出滅菌杯。
 4. 肉眼確認產品外包裝。假若滅菌劑外盒受損，請勿使用外盒有損壞的滅菌劑；關於杯子外漏、損壞或過期的棄置處理方式，請參照滅菌處理系統的操作說明。
 5. 若杯子無外漏或損壞情況發生，請將本產品整杯放入滅菌鍋中，依照滅菌處理系統的操作手冊指示進行步驟。
- **警告及注意事項：**
 - R7 可能導致火災
 - R10 易燃物
 - R20 吸入時有害
 - R21 接觸皮膚有害
 - R22 吞食有害
 - R35 會導致嚴重的灼傷

- R50 對水生生物極其有毒
R3/7 保管容器必須嚴格密閉並置於陰涼處
S14 遠離熱和燃火
S26 接觸眼睛後立即用大量清水沖洗並就醫
S36/37/39 穿戴適合的防護服、手套及護目/臉部裝備
S45 發生事故或感到不適時，立即就醫
S61 防止排放至環境，參考滅菌鍋操作手冊內的特別丟棄指示或安全技術表
- ◆ 請勿使用超過外盒印製有效日期的產品
 - ◆ 本產品杯內包含 35% 過醋酸液體。眼睛接觸後可能會造成無法復原的傷害，甚至失明
 - ◆ 請勿接觸皮膚。接觸 35% 過醋酸可能會破壞皮膚組織
 - ◆ 接觸皮膚可能導致化學灼傷，出現白斑或水泡
 - ◆ 高濃度的過醋酸蒸氣會導致流淚，刺激鼻子、喉嚨及肺部
 - ◆ 氣喘患者可能更容易受到吸入過醋酸蒸氣的影響
 - ◆ 接觸到本產品外杯的惰性粉狀成份可能引起過敏反應
 - ◆ 本產品的稀釋使用不具腐蝕性，但可能會導致過敏者皮膚刺激
 - ◆ 處理或丟棄半滿、外漏、損壞或過期的過醋酸濃度滅菌劑杯子時，需穿著適宜的個人防護設備(PPE)。最底限的 PPE 應該包含防化學手套、工作圍裙、護目鏡、面罩及機構程序要求的其他防護
 - ◆ 若要嘗試人工開啟密封的 S40 濃縮滅菌劑，需特別謹慎小心

● **儲存與棄置：**

儲存：到使用前為止必須保持 16-27°C (61-81°F)，直立勿傾倒，避免陽光，遠離熱源或煙火，乾燥環境。請勿使用過期的 S40 滅菌濃縮劑。

棄置：用過的杯子棄置在妥當的容器。關於杯子外漏、損壞或過期的棄置處理方式，請參照滅菌處理系統的操作說明。

● **規格：**

每杯 S40 過醋酸濃縮滅菌劑內含：

活性成分(液體)35%過醋酸	76.5g
惰性成分(粉末)	117.7g
總淨含量	194.2g

製造廠名稱：STERIS Corporation

製造廠地址：6515 Hopkins Road, Mentor, OH 44060, USA

藥商名稱：中藤實業有限公司

藥商地址：台中市西屯區西屯路 2 段 126 巷 9 號 1F

S40 STERILANT CONCENTRATE

