

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	曼秀雷敦抗菌痘痘貼	申請醫療器材商	台灣曼秀雷敦股份有限公司
--------	-----------	---------	--------------

小痘痘專用



MENTHOLATUM®

小痘痘專用



MENTHOLATUM®

有效抑制痤瘡桿菌

曼秀雷敦® Acnes 抗菌 痘痘貼

MENTHOLATUM® ACNES ANTI-BACTERIAL ACNE PATCH

0.03cm 薄型貼片，加強吸收分泌物，有效解決痘痘問題！

- 經SGS抗菌實驗證實，能在6小時內有效抑制痤瘡桿菌
- 採用親水性敷料，有效吸收分泌物，加速青春痘復原；
- 外層隔菌透氣，能保護青春痘，避免二次細菌感染
- 表層霧面設計，接近膚色不反光；防水防汗，服貼不脫落
- 搭配全新易撕線設計，撕取痘痘貼更便利！

經SGS實驗證實，能在6小時內有效抑制痤瘡桿菌

經SGS實驗證實，能在6小時內有效抑制痤瘡桿菌

使用方法

1. 清潔欲貼上之部位，並待其乾燥
2. 雙手洗淨並擦乾，沿著痘痘貼中央的易撕線撕開一半離型紙，取下痘痘貼
3. 直接貼於青春痘上。可用手指輕壓痘痘貼的邊緣約5秒，加強固定效果
4. 當本產品由透明變白色狀時(表示已吸收分泌物)或使用12小時後，即可更換新的貼片
5. 本產品建議單片使用，若於青春痘上塗抹藥膏可能會影響黏貼性。如需在青春痘上塗抹藥膏，請待藥品吸收後，肌膚恢復乾燥後再使用
6. 若需化妝，請於貼片後再上妝

【注意事項】

- 請勿置於陽光直射或高溫場所
- 未用完的產品，請密封後儲存於陰涼處
- 請避免重複貼貼，以免影響黏貼性
- 使用後若有不適，請停止使用，並立即至皮膚科就診
- 請勿使用於破損或紅腫的信口
- 本產品為無菌包裝，滅菌方式採用Gamma-ray照射
- 本產品包裝破損及拆封後，即不保證處於無菌狀態

品名：曼秀雷敦抗菌痘痘貼

有效期間：4年 批號：00000000 保存期限(西元年/月/日)：0000/00/00

成分：親水性水膠體、聚甲基纖維素、PVA、六次甲基氨基羧酸

規格：直徑0.8cm X 35入

衛生部醫器製造字號：007540號

Mentholatum, Mentholatum Acnes, 曼秀雷敦, 小護士 註冊商標

由美國曼秀雷敦公司授權台灣曼秀雷敦股份有限公司使用

醫療器材商名稱：台灣曼秀雷敦股份有限公司

醫療器材商地址：台北市衛生局最新核定之醫療器材商地址內登刊載(市售品須刊載實際地址)

製造業者名稱及地址：台灣曼秀雷敦股份有限公司
委託製造商：曼秀雷敦股份有限公司
(地址：桃園市龜山區建國路29號製造廠)

消費者的服務熱線：0800-231-149

471986516072229

112.10.13

曼秀雷敦® Acnes 抗菌 痘痘貼 薄型

90mm

曼秀雷敦® Acnes 抗菌 痘痘貼

薄型 0.03cm

Mentholatum®

Acnes

抗菌 痘痘貼

6小時 有效抑制痤瘡桿菌

35入 | 0.8cm x 35

或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
 ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	曼秀雷敦抗菌痘痘貼	申請醫療器材商	台灣曼秀雷敦股份有限公司
--------	-----------	---------	--------------



112.10.13

MENTHOLATUM

綜合型

抗菌

MENTHOLATUM

綜合型

抗菌

有效抑制痤瘡桿菌

曼秀雷敦® Acnes 抗菌痘痘貼
MENTHOLATUM® ACNES ANTI-BACTERIAL ACNE PATCH

0.03cm薄型貼片，加強吸收分泌物，有效解決痘瘡問題！

- 經SGS抗菌實驗證實，能在6小時內有效抑制痤瘡桿菌，幫助減少痘瘡問題
- 採用親水性敷料，有效吸收分泌物，加速青春痘復原；外層隔菌透氣，能保護青春痘，避免二次細菌感染
- 表面霧面設計，接近膚色不反光；防水防汗，服貼不脫落
- 搭配全新易撕線設計，撕取痘痘貼更便利！

使用方法

1. 清潔欲貼上之部位，並待其乾透
2. 雙手洗淨並擦乾，沿著痘痘貼中央的易撕線撕開一半圓形紙，取下痘痘貼直接貼於青春痘上。可用手指輕輕壓痘痘貼的邊緣約5秒，加強固定效果
3. 當本產品由透明變白色狀時表示已吸收分泌物或使用12小時後，即可更換新的貼片
4. 本產品建議單獨使用，若於青春痘上塗抹藥膏可能會影響黏性。如欲在膏霜上塗抹藥膏，請待藥品吸收後，肌膚恢復乾燥後再使用
5. 若需化妝，請於貼貼後再上妝

【注意事項】●請勿置於陽光直射或高溫場所 ●未用完的產品，請密封後儲存於陰涼處 ●請避免重複貼貼，以免影響黏性 ●使用後若有不適，應停止使用，並立即至皮膚科就診 ●請勿使用於發熱性的傷口 ●本產品為無菌包裝，滅菌方式採用 Gamma-ray 照射 ●本產品包裝結構及拆封後，即不保證處於無菌狀態

品名：曼秀雷敦抗菌痘痘貼
效 能：可有效抑制痘瘡中吸收分泌物，提供專業優良良好痘瘡護理
有效期限：4年 批號：00000000 保存期限(西元年/月/日)：0000/00/00
成 分：親水性水膠體、耐用基纖維、PU膜、大分子甲基纖維素
規 格：單個0.8cm x 1.6cm x 0.03cm X 5片裝 X 5片裝
衛生管理字號：衛007540號
Mentholatum, Mentholatum Acnes, 曼秀雷敦, 小護士商標
係由美國曼秀雷敦公司授權台灣曼秀雷敦股份有限公司使用
醫藥器材商名稱：台灣曼秀雷敦股份有限公司
醫藥器材商地址：台北市中正區羅斯福路之曼秀雷敦器材商地址內寄刊載
(中直品須有印實物或試品)
製造業者名稱及地址：台灣曼秀雷敦股份有限公司
登記的醫藥器材商地址：台北市中山區國泰路29號製造
地址：桃園市龜山區國泰路29號製造
消費者服務熱線：0800-231-149 BAGAD02308



90mm

曼秀雷敦® Acnes 抗菌痘痘貼 薄型

曼秀雷敦® Acnes 抗菌痘痘貼 薄型

曼秀雷敦® Acnes 抗菌痘痘貼 薄型

薄型 0.03cm

Mentholatum®

Acnes

抗菌痘痘貼

6小時 有效抑制痤瘡桿菌

26入 | 0.8cm x 1.6 - 1.0cm x 5 - 1.2cm x 5

或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	曼秀雷敦抗菌痘痘貼	申請醫療器材商	台灣曼秀雷敦股份有限公司
--------	-----------	---------	--------------



有效抑制痤瘡桿菌

曼秀雷敦 Acnes 抗菌痘痘貼
MENTHOLATUM® ACNES ANTI-BACTERIAL ACNE PATCH

0.03cm 薄型貼片，加強吸收分泌物，有效解決痘痘問題！

- 經SGS抗菌實驗證實，能在6小時內有效抑制痤瘡桿菌、幫助減輕痘痘問題
- 採用親水性敷料，有效吸收分泌物，加速青春痘復原；外層隔菌透氣，能保護青春痘，避免二次細菌感染
- 表層霧面設計，接近膚色不反光；防水防汗，服貼不脫落
- 搭配全新易撕線設計，撕取痘痘貼更便利！

使用方法

1. 清潔欲貼上之部位，並待其乾燥
2. 雙手洗淨並擦乾，沿痘痘貼中央的易撕線撕開一半離型紙，取下痘痘貼直接貼於青春痘上。可用手指輕壓痘痘貼的邊緣約5秒，加強固定效果
3. 當本產品由透明變白色狀態時(表示已吸收分泌物)或使用12小時後，即可更換新的貼片
4. 本產品建議單獨使用，若於青春痘上塗抹藥膏可能會影響黏貼性。如需在青春痘上塗抹藥膏，請待藥品吸收後，肌膚恢復乾燥後再使用
5. 若需七妝，請於貼貼後再上妝

【注意事項】●請勿置於陽光直射或高溫場所。未用完的產品，請密封後存放於陰涼處。●請避免重複貼，以免影響黏貼性。●使用後若有不適，請停止使用，並立即至皮膚科諮詢。●請勿用於於敏感性的傷口。●本產品為無菌包裝，無菌方式採用 Gamma-irradiation。●本產品包裝破損及拆封後，即不保證處於無菌狀態

品名：曼秀雷敦抗菌痘痘貼
效成分：有效抑制痤瘡桿菌吸收分泌物，提供青春痘良好的復原環境
成分：親水性水膠體、聚甲基丙烯酸酯、PU膜、六次甲氧基聚氧乙烯
規格：單張 0.8cm X 3.5cm
批發：00000000
有效期間：4年
保存期限(西元/年/月/日)：0000/00/00
保存期限(西元/年/月/日)：0000/00/00
製造商：曼秀雷敦(台灣)股份有限公司 小樽士蘭註冊商標
總經銷商：曼秀雷敦(台灣)股份有限公司 衛部醫器執字第007540號
製造商名稱及地址：台灣曼秀雷敦股份有限公司
總經銷商名稱及地址：曼秀雷敦(台灣)股份有限公司
(地址：桃園市龜山區復興路292號)
消費者服務熱線：0800-231-149 BADA012308

112.10.13
47198651607458
衛部醫器執字第007540號

曼秀雷敦 Acnes 抗菌痘痘貼 薄型



90mm

薄型 0.03cm

Mentholatum®
Acnes

抗菌痘痘貼

6小時
有效抑制痤瘡桿菌

綜合型 61入 | 0.8cm x 51 | 1.0cm x 51 | 1.2cm x 5

或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	曼秀雷敦抗菌痘痘貼	申請醫療器材商	台灣曼秀雷敦股份有限公司
--------	-----------	---------	--------------



112.10.13

0.13

綜合型

綜合型

曼秀雷敦® Acnes 抗菌痘痘貼

MENTHOLATUM® ACNES ANTI-BACTERIAL ACNE PATCH

0.02cm 極緻薄系列

鼻面極緻薄貼片，0.02cm極柔貼合肌膚，每個角度都變形！

●經SGS抗菌實驗證實，能在6小時內有效抑制痤瘡桿菌，幫助減少痘痘問題

●採用親水性敷料，有效吸收分泌物，加速青春痘復原；外層隔菌透氣，能保護青春痘，避免二次細菌感染

●表層霧面設計，接近膚色不反光；防水防汗，服貼不脫落

●搭配全新易撕線設計，撕取痘痘貼更便利！

使用方法

- 清潔欲貼上之部位，並待其乾燥
- 雙手洗淨並擦乾，沿著痘痘貼中央的易撕線撕開一半，離型紙，取下痘痘貼，直接貼於青春痘上。可用手指指腹輕壓痘痘貼的邊緣約5秒，加強固定效果
- 當本產品由透明變白色狀時表示已吸收分泌物或使用12小時後，即可更換新的貼片
- 本產品建議單層使用，若於青春痘上塗抹藥膏可能會影響黏性。如需在青春痘上塗抹藥膏，請待藥品吸收後，肌膚恢復乾燥後再使用
- 若需化妝，請於點貼後再上妝

【注意事項】●請勿置放於陽光直射或高溫場所 ●未用完的產品，請密封後儲存於陰涼處 ●請避免重複貼貼，以免影響黏性 ●使用後若有不適，請停止使用，並立即至皮膚科就診 ●請勿使用於開放性的傷口 ●本產品為單層包裝，滅菌方式採用 Gamma-ray 照射 ●本產品包裝破損及拆封後，即不保證處於無菌狀態

品名：曼秀雷敦抗菌痘痘貼
效期：可殺菌抑制痘痘菌並吸收分泌物，提供青春痘良好的修復環境
有效期間：4年 批號：00000000 保存期限(西元/年/月/日)：0000/00/00
成份：親水性水膠體、聚丙烯纖維等、PU、六次甲基噻嘧啶
規格：直徑0.6cm X 1.4 X 1.1cm X 12入
批發部電話：02-26075408
Mentholatum, Mentholatum Acnes, 曼秀雷敦, 小護士圖註冊商標
係由美國曼秀雷敦公司授權台灣曼秀雷敦股份有限公司使用
醫器製材商名稱：台灣曼秀雷敦股份有限公司
醫器製材商地址：台北市衛生局醫器製材商地址內容詳閱
製造業者名稱及地址：(中)曼秀雷敦股份有限公司
曼秀雷敦股份有限公司
曼秀雷敦醫器製材有限公司
曼秀雷敦醫器製材有限公司
地址：桃園市龜山區龍潭路29號製造
BAGADUN2308
消費專線熱線：0800-231-149

4719865611325

曼秀雷敦® Acnes 抗菌痘痘貼

90mm

曼秀雷敦® Acnes 抗菌痘痘貼

極緻薄

Mentholatum®

Acnes

抗菌痘痘貼

6小時

有效抑制痤瘡桿菌

26入 | 0.9cm x 1.4 x 1.1cm x 12

或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
 ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	曼秀雷敦抗菌痘痘貼	申請醫療器材商	台灣曼秀雷敦股份有限公司
--------	-----------	---------	--------------

曼秀雷敦® Acnes 抗菌痘痘貼

超值組

0.02cm 極緻薄系列

曼秀雷敦® Acnes 抗菌痘痘貼
MENTHOLATUM® ACNES ANTI-BACTERIAL ACNE PATCH

霧面極緻薄貼片，0.02cm 輕柔貼合肌膚，每個角度都變形！

- 經SGS抗菌實驗證實，能在6小時內有效抑制痤瘡桿菌繁殖問題
- 採用親水性膠料，有效吸收分泌物，加速青春痘復原；外層隔菌透氣，能保護青春痘，避免二次細菌感染
- 表面霧面設計，接近膚色不反光；防水防汗，服貼不脫落
- 搭配全新易撕線設計，撕取痘痘貼更便利！

使用方式

1. 清潔欲貼上之部位，並待其乾燥
2. 雙手洗淨並擦乾，沿著霧面貼中央的易撕線撕開一半圓形紙，取下痘痘貼，直接貼於青春痘上。可用手指輕壓痘痘貼的邊緣約5秒，加強固定效果
3. 當本產品由透明變白色表示時(表示已吸收分泌物)或使用12小時後，即可更換新的貼片
4. 本產品建議單獨使用，若於青春痘上塗抹藥膏可能會影響黏貼性。如需在膏藥後上塗抹藥膏，請待藥品吸收後，肌膚恢復乾燥後再使用
5. 若需化妝，請於貼貼後再上妝

【注意事項】

- 請勿置於陽光直射或高溫場所 ● 未用完的產品，請密封後儲存於陰涼處 ● 請避免重複貼貼，以免影響黏貼性 ● 使用後若有不適，請停止使用，並立即至皮膚科診治 ● 請勿使用於敏感性的傷口 ● 本產品為新包裝，滅菌方式採用 Gamma-ray 照射 ● 本產品包裝袋損壞及拆封後，即不保證處於無菌狀態

品名：曼秀雷敦抗菌痘痘貼
效期：可抑制痤瘡桿菌並吸收分泌物，提供肌膚良好的修復環境
有效期限：4年 批號：00000000 保存期限(西元年/月/日)：0000/00/00
成分：親水性水膠體、異丙基纖維素、PU、六次甲基亞胺鹽
規格：直徑0.9cm X28入/1.1cm X24入
衛部醫器類字號007540號
Mentholatum, Mentholatum Acnes, 曼秀雷敦, 小護士圖註冊商標
係由曼秀雷敦藥業股份有限公司與台灣曼秀雷敦股份有限公司使用
醫療器材商名稱：台灣曼秀雷敦股份有限公司
醫療器材商地址：台南市衛生路新街新街新街新街新街新街
醫療器材商地址：(請填產品包裝袋背面地址內容刊登)
製造業者名稱及地址：曼秀雷敦股份有限公司 桃園廠
曼秀雷敦材料股份有限公司 桃園廠
(地址：桃園市龜山區國道四號29號) 敬啟
消費者服務熱線：0800-231-149 BABADUUV2308

曼秀雷敦® Acnes 抗菌痘痘貼

極緻薄

90mm

6小時
有效抑制痤瘡桿菌

綜合型 52入 | 0.9cm x 28 + 1.1cm x 24

※ 中文說明書擬稿包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
 ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side or a very light print.

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	曼秀雷敦抗菌痘痘貼	申請醫療器材商	台灣曼秀雷敦股份有限公司
--------	-----------	---------	--------------

小痘專用

抗菌

MENTHOLATUM



0.02cm 極緻薄系列



曼秀雷敦® Acnes 抗菌 痘痘貼

MENTHOLATUM® ACNES ANTI-BACTERIAL ACNE PATCH

霧面極緻薄貼片，0.02cm輕柔貼合肌膚，每個角度都變形！

- 經SGS抗菌實驗證實，能在6小時內有效抑制痤瘡桿菌，幫助減緩痘痘問題
- 採用親水性膠料，有效吸收分泌物，加速青春痘剝離；外層隔菌透氣，能保護青春痘，避免二次細菌感染
- 表層霧面設計，接近膚色不反光；防水防汗，服貼不脫落
- 搭配全新易撕線設計，撕取痘痘貼更便利！

使用方法

1. 清潔欲貼上之部位，並待其乾燥
2. 雙手洗淨並擦乾，沿著痘痘貼中央的易撕線撕開一半圓型紙，取下痘痘貼直接貼於青春痘上。可用手指輕輕壓痘痘貼的邊緣約5秒，加強固定效果
3. 當本產品由透明變白色狀時(表示已吸收分泌物)或使用12小時後，即可更換新的貼片
4. 本產品建議單層使用，若於青春痘上塗抹藥膏可能會影響黏貼性。如需在青春痘上塗抹藥膏，請待藥品吸收後，肌膚恢復乾燥後再使用
5. 若需化妝，請於黏貼後再上妝

【注意事項】

- 請勿置於陽光直射或高溫場所
- 未用完的產品，請密封後儲存於陰涼處
- 請避免重複黏貼，以免影響黏貼性
- 使用後若有不適，請停止使用，並立即至皮膚科就診
- 請勿使用於有感染性的傷口
- 本產品為無菌包裝，滅菌方式採用Gamma-ray照射
- 本產品包裝玻璃瓶及拆封後，即不保證處於無菌狀態

品名：曼秀雷敦抗菌痘痘貼
 規格：寬0.9cm X 20入
 衛部醫器製字第007540號
 Mentholatum, Mentholatum, Acnes, 曼秀雷敦, 小護士圖註冊商標
 係由美國曼秀雷敦公司授權台灣曼秀雷敦股份有限公司使用
 醫器器材商名稱：台灣曼秀雷敦股份有限公司
 醫器器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫器器材商地址內容刊登(產品須刊登實際地址)
 製造業者名稱及地址：台灣曼秀雷敦股份有限公司
 委託明泰材料股份有限公司桃園廠
 (地址：桃園市龜山區復興東路29號)製造
 BABADJSC2308
 消費者服務熱線：0800-231-1149

112.10.13

4719865160743



曼秀雷敦® Acnes 抗菌 痘痘貼

極緻薄

Mentholatum®

Acnes

抗菌 痘痘貼

6小時
有效抑制痤瘡桿菌

20入 | 0.9cm x 20

曼秀雷敦® Acnes 抗菌 痘痘貼

極緻薄

曼秀雷敦® Acnes 抗菌 痘痘貼

極緻薄

※ 中文說明書擬稿包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
 ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

Handwritten header information including a date and a circular stamp.

Main body of the document containing faint, illegible text.

Printed footer text at the bottom of the page.

10. 1



中文品名：曼秀雷敦抗菌痘痘貼

英文品名：MENTHOLATUM ACNES ANTI-BACTERIAL ACNE PATCH

衛部醫器製字第 007540 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品說明：

有效抑制痤瘡桿菌

吸收分泌物+抑菌 雙重效能，減緩痘痘問題！

- 經 SGS 抗菌實驗證實，能在 6 小時內抑制痤瘡桿菌，幫助減緩痘痘問題
- 採用親水性敷料，有效吸收分泌物，加速青春痘復原；外層隔菌透氣，能保護青春痘，避免二次細菌感染
- 0.03cm 薄型貼片，加強吸收分泌物，減緩痘痘問題；0.02cm 極緻薄貼片，輕柔貼合肌膚
- 表層霧面設計，接近膚色不反光；防水防汗，服貼不脫落
- 搭配全新易撕線設計，撕取痘痘貼更便利！

成份：親水性水膠體、羧甲基纖維素、PU 膜、六次甲基雙醋酸氯啶

效能：可有效抑制痤瘡桿菌並吸收分泌物，提供青春痘良好的復原環境

使用方法：

1. 清潔欲貼上之部位，並待其乾燥
2. 雙手洗淨並擦乾，沿著痘痘貼中央的易撕線撕開一半離型紙，取下痘痘貼直接貼於青春痘上。可用手指輕壓痘痘貼的邊緣約 5 秒，加強固定效果
3. 當痘痘貼由透明變白色狀時(表示已吸收分泌物)或使用 12 小時後，即可更換新的貼片
4. 本產品建議單獨使用，若於青春痘上塗抹藥膏可能會影響黏性。如需在青春痘上塗抹藥膏，請待藥品吸收後，肌膚恢復乾燥後再使用
5. 若需化妝，請於黏貼後再上妝

注意事項：

•請勿置放於陽光直射處或高溫場所 •未用完的痘痘貼，請密封後儲存於陰涼處 •請避免重複撕貼，以免影響黏性 •使用後若有不適，請停止使用，並立即至皮膚科就診 •請勿使用於感染性的傷口 •本產品為無菌包裝，滅菌方式採用 Gamma-ray 照射 •本產品包裝破損或拆封後，即不保證處於無菌狀態

有效期間：4 年；批號/保存期限：如外盒標示

醫療器材商名稱：台灣曼秀雷敦股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

製造業者名稱：台灣曼秀雷敦股份有限公司委託明基材料股份有限公司桃園廠製造

製造業者地址：桃園市龜山區建國東路 29 號

消費者服務熱線：0800-231-149




規格及型號：


編號	片數	規格	內容物	備註
1	35	0.8cmx35	編號(1)	薄型-小痘痘專用
2	26	0.8cmx16, 1.0cmx5, 1.2cmx5	編號(2)	薄型-綜合型
3	20	0.8cmx20	編號(3)	薄型-CVS 版
4	70	【0.8cmx35】X 2 入	編號(1) x 2 入	薄型-小痘痘專用 超值組
5	40	【0.8cmx20】X 2 入	編號(3) x 2 入	薄型-小痘痘專用 40 入
6	61	0.8cmx51, 1.0cmx5, 1.2cmx5	編號(1)+(2)	薄型-綜合型 超值組
7	55	0.8cmx55	編號(1)+(3)	薄型-小痘痘專用 超值組
8	46	0.8cmx36, 1.0cmx5, 1.2cmx5	編號(2)+(3)	薄型-綜合型 超值組
9	60	【0.8cmx20】X 3 入	編號(3) x 2 入	薄型-小痘痘專用 超值組
10	52	0.8cmx32, 1.0cmx10, 1.2cmx10	編號(2) x 2 入	薄型-綜合型 超值組
11	78	0.8cmx48, 1.0cmx15, 1.2cmx15	編號(2) x 3 入	薄型-綜合型 超值組
12	81	0.8cmx71, 1.0cmx5, 1.2cmx5	編號(1)+(2)+(3)	薄型-綜合型 量販包
13	105	【0.8cmx35】X 3 入	編號(1) x 3 入	薄型-小痘痘專用 量販包
14	26	0.9cm x 14, 1.1cm x 12	編號(14)	極緻薄-綜合型
15	28	0.9cm x 28	編號(15)	極緻薄-小痘痘專用
16	54	0.9cm x 42, 1.1cm x 12	編號(14) + (15)	極緻薄-綜合型 超值組
17	52	0.9cm x 28, 1.1cm x 24	編號(14) x 2 入	極緻薄-綜合型 超值組
18	78	0.9cm x 42, 1.1cm x 36	編號(14) x 3 入	極緻薄-綜合型 超值組
19	104	0.9cm x 56, 1.1cm x 48	編號(14) x 4 入	極緻薄-綜合型 量販包
20	56	0.9cm x 56	編號(15) x 2 入	極緻薄-小痘痘專用 量販包
21	84	0.9cm x 84	編號(15) x 3 入	極緻薄-小痘痘專用 量販包
22	112	0.9cm x 112	編號(15) x 4 入	極緻薄-小痘痘專用 量販包
23	80	0.9cm x 56, 1.1cm x 24	編號(14)*2 + (15)	極緻薄-綜合型 量販包
24	82	0.9cm x 70, 1.1cm x 12	編號(14) + (15)*2	極緻薄-綜合型 量販包
25	108	0.9cm x 84, 1.1cm x 24	編號(14)*2 + (15)*2	極緻薄-綜合型 量販包
26	20	0.9cm x 20	編號(26)	極緻薄-CVS 版
27	12	0.9cm x 12	編號(27)	極緻薄-輕巧包
28	15	0.9cm x 15	編號(28)	極緻薄-小痘痘專用 輕巧包

註：編號(1)~(13)為薄型貼片，厚度 0.03cm；編號(14)~(28)為極緻薄貼片，厚度 0.02cm

112

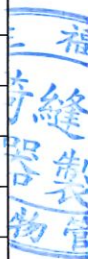

曼秀雷敦抗菌痘痘貼
產品實際外觀彩色圖片

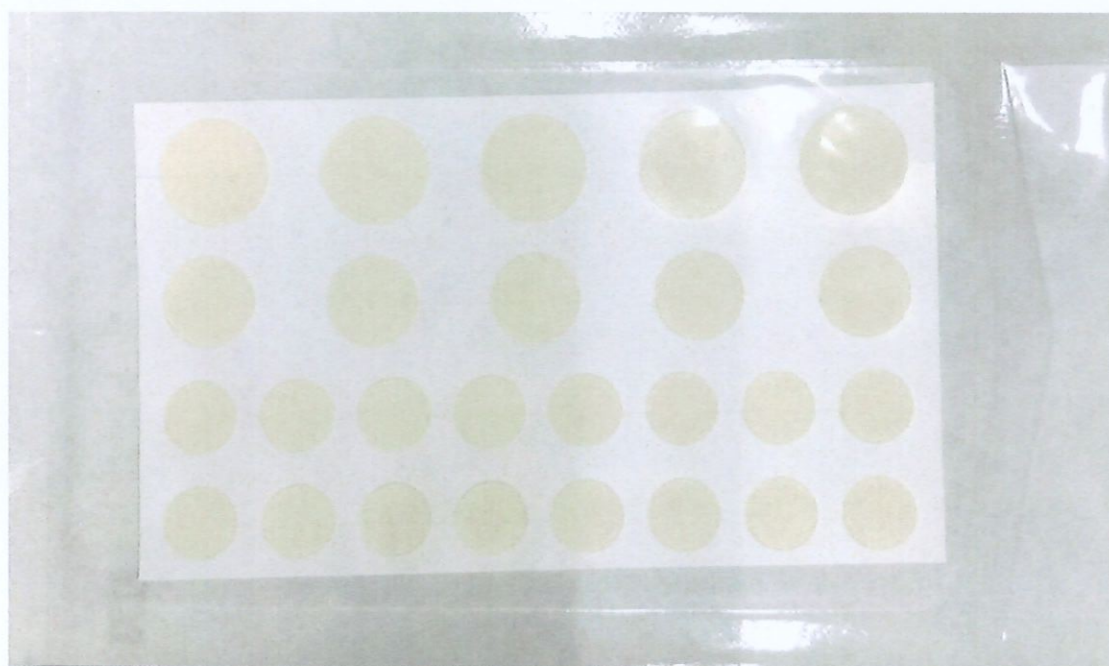

山西書院附屬圖書館

