

# 海昌多效潔淨保養液

## Extra Clean Multi-purpose Solution

衛署醫器陸輸字第 000444 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

### 產品介紹

海昌多效潔淨保養液可清潔軟性隱形眼鏡鏡片；清除鏡片表面汙物及有機物；對大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌有殺菌作用；去除鏡片上的蛋白質；潤滑鏡片，增加鏡片配戴時的舒適性。本品可滿足軟性隱形眼鏡日常護理的需要。

### 【成分】

為無菌、等滲溶液，含有硼酸、硼砂、乙二胺四乙酸二鈉（EDTA-2Na）、聚六亞基雙胍（PHMB）、氯化鈉、泊洛沙姆、羥丙基甲基纖維素（HPMC）。

### 【主要有效成分及含量】

聚六亞基雙胍：0.0018 mg/ml

乙二胺四乙酸二鈉：0.5 mg/ml

泊洛沙姆：2.0 mg/ml

羥丙基甲基纖維素：0.6 mg/ml

### 【性能】

正確使用保養液可以：

去除隱形眼鏡鏡片上的蛋白質、汙物及有機物

對鏡片進行消毒殺菌

濕潤、潤滑隱形眼鏡鏡片

沖洗、清潔和貯存隱形眼鏡

### 【殺滅微生物類別】

對大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌有殺菌作用。

### 【適用範圍】

適用於軟性角膜接觸鏡鏡片的沖洗、清潔、潤滑、消毒、去除蛋白、浸泡、貯存。

### 【功能與作用】

成分	功能	作用
聚六亞基雙胍	消毒	對綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌有殺菌作用。
泊洛沙姆	清潔、保濕、潤滑	有效去除汙物和有機物，在清潔的同時，保持並補充鏡片濕潤度。
乙二胺四乙酸二鈉和泊洛沙姆	清除蛋白	拆散蛋白分子結構，有效清除蛋白。
羥丙基甲基纖維素	潤滑、保濕	在鏡片上形成保濕層增加鏡片的配戴舒適感。

## 使用方法

隱形眼鏡鏡片護理前應當：

- 保持配戴環境的衛生。
- 事先將指甲剪短並將邊緣打磨光滑，以免損傷眼睛和鏡片。
- 用流動的水和中性肥皂將雙手徹底洗乾淨，再用清潔無絮的毛巾擦乾。
- 注意避免混淆左右鏡片，養成固定的護理程式。
- 按以下步驟操作清潔和消毒隱形眼鏡鏡片：
  - 第一步：清潔：請於鏡片表面滴 3-5 滴多功能保養液在手掌心，以食指從中心到邊緣放射狀輕輕揉搓鏡片正反兩面至少 10 秒。
  - 第二步：沖洗：使用多功能保養液徹底沖洗鏡片正反兩面各 5 秒鐘，以去除鏡片表面殘存物。
  - 第三步：消毒：將鏡片放入鏡片盒內，在鏡片盒內放入新鮮的多功能保養液至完全浸沒鏡片，將盒蓋扭緊後，浸泡至少 6 小時或過夜。
  - 第四步：取出鏡片配戴時，先用新鮮的保養液沖洗鏡片正反面各 5 秒，然後按鏡片配戴手冊的要求進行配戴。
  - 第五步：丟棄鏡盒中藥液，使用新鮮的保養液沖洗鏡盒，自然風乾以備用。

如鏡片長期不使用，應將鏡片浸泡在含保養液的鏡盒中，最長三十天，如超過三十天，應更換鏡盒中的保養液，並用新鮮的保養液對鏡片進行清潔消毒後再儲存。

眼科醫師可能會建議您搭配使用其他產品或依個人的淚液分泌及配戴的情況，而建議您加強鏡片的清潔。請遵照眼科醫師的指示使用。

## 警告

請根據眼科醫師指導和產品使用說明書的指示，正確使用鏡片和護理產品，包括鏡片盒。長戴鏡片應該定期摘下進行清潔、消毒，並根據說明書或眼科醫生的指導進行拋棄和更新。建議隱形眼鏡配戴者每年至少二次拜訪眼科醫師。避免溶液污染，請勿任意將溶液倒到其他瓶罐或容器中。請勿將保養液加熱消毒。

## 注意事項

1. 切勿重複使用已處理過鏡片的保養液。
2. 每次使用後，必須立即旋緊瓶蓋。
3. 室溫下保存。
4. 在標示的有效期內使用，在開封三個月後丟棄剩餘保養液。
5. 隱形眼鏡保養液應該保存在小孩接觸不到的地方。
6. 切勿將藥水瓶口接觸其他物體，以免污染瓶內藥水。
7. 開封前，若發現保養液瓶破損或漏液，請勿使用，可向銷售店家更換。

## 不良反應

如果感到眼睛刺激、灼痛、過度流淚、視力改變或眼部充血等不適症狀，應立即取出鏡片。

如不適症持續，請立即諮詢眼科醫生。

如不適症狀馬上消失，請仔細檢查鏡片。如鏡片有損傷，請丟棄並更換新的鏡片；如鏡片上有汙物或其它異物或看似無損，都應徹底清潔、沖洗後方可配戴。配戴後如不適症持續，請立即摘下鏡片，並諮詢眼科醫生。

包裝規格為每瓶 60ml、120ml、240ml、360ml 及 500ml。

藥商：永勝光學股份有限公司

地址：台中市大雅區中科路 6 號 3 樓之 1

製造廠名稱：Haichang Contact Lens Co., Ltd.

製造廠地址：No. 1, Danfu Road, Situ Town, Danyang City, Jiangsu Province, China