

# “長庚”耳溫槍探測頭護套（排列式包裝）使用說明書

## “Chang Gung” Cover of Infrared ear thermometer（Arrayed-Type）

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

許可證字號：衛部醫器製字第 007042 號

### 1 產品敘述

- 本產品係由聚丙烯(Polypropylene)所製造而成。
- 產品呈透明圓錐狀， $\varnothing 27\text{ mm} \times 23\text{ mm}$  深。

### 2 作用方式

- 透過電子式耳溫槍的搭配使用，可避免耳溫槍探測頭受到污染而影響量測準確度。
- 本產品為單次測量使用，可避免使用者的交叉感染。

### 3 產品型號、規格及包裝形式

- 產品型號：PECG1011。

產品規格：產品規格如圖 1。

單位 mm

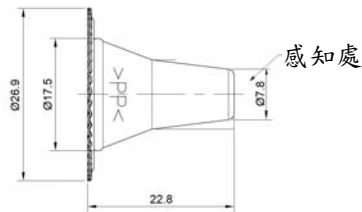


圖 1 產品規格圖

- 包裝形式：每盒 10 個單元盒蓋，每單元盒蓋內含 10 個探測頭護套，共 100 個。

### 4 使用方法

- 本產品適用於“長庚”紅外線耳溫槍（衛部醫器製字第 005387 號）及“長庚”生理訊號監視器（衛部醫器製字第 005579 號），可配合耳溫槍扣件扣合及彈開解扣。
- 使用步驟如表 1。

表 1 使用步驟說明

步 驟	說 明
	先壓開單元盒蓋上之撕裂線。
	再上掀單元盒蓋。
	將耳溫槍探測頭對準探測頭護套後輕壓，即可扣取耳溫套。
	用畢後請將單元盒蓋蓋回。

- 於套上探測頭護套後，請勿以手或其他物品碰觸護套感知處，避免感知處破裂或污染，進而影響實際測量之人體溫度。
- 開封後請將本產品存放於不受陽光直接照射及灰塵污染之陰涼處。

### 5 警告

- 拆封後，請妥善保存，並儘快用完。
- 為避免交叉感染，耳溫槍探測頭護套請勿重複使用。

### 6 儲存

- 本產品應避免陽光直曬並保存於原本的包裝中，且應存放於乾燥（相對溼度小於 90%）的儲存環境。
- 本產品儲存溫度範圍為  $-5\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，保存期限為 2 年，請參閱外盒上之標籤標示。
- 若日期超過標籤上標示的保存期限時，請勿使用。

### 7 包裝符號說明



藥商名稱：長庚醫學科技股份有限公司  
 藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載（市售品須刊載實際地址）  
 製造廠名稱：長庚醫學科技股份有限公司林口廠  
 製造廠地址：新北市泰山區南林路118號2樓