

“巴帝特”傷口與皮膚科護理敷料

“BIOTITUS” Derma ointment

衛部醫器輸字第 026887 號

使用請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

型號	規格	單位數/盒
CIM010	10cmx10cm/片	10
ABT015	15 ml/每管	10
UBT020	20 ml/條	1
UBT050	50 ml/條	1
UBT100	100 ml/條	1
UBT500	500 ml/瓶	1

巴帝特浸漬敷布 10cmx10cm 組成

材料: 吸水材質

保護膜: 聚丙烯膜

軟膏含: 次沒食子酸鈹、洋橄欖油、葵花油、氫化蓖麻油、蜂蠟、松香、樟腦

巴帝特軟膏條(管、瓶)組成

軟膏含: 次沒食子酸鈹、洋橄欖油、葵花油、氫化蓖麻油、蜂蠟、松香、樟腦

用途

此產品適用在-

1. 急性傷口局部治療: 第一度與第二度燒傷、擦傷、潰瘍、其他外傷傷口和其他皮膚損傷。
2. 褥瘡、慢性血管潰瘍、糖尿病潰瘍。
3. 雷射照射後的傷口治療。

浸漬敷布使用說明-

1. 每次用浸漬敷布前傷口以林格溶液(Ringer solution)、高滲透溶液(生理食鹽水)清洗乾淨。
2. 浸漬的敷布在除去保護膜後單層直接覆蓋在傷口上，敷布可用無菌器械切割成符合傷口大小。可用無菌敷料(紗布、不織布敷料)鋪在軟膏敷布上，可保護產生有利的癒合環境。敷料依傷口演變每天或每兩天更換。
3. 在較大傷口面使用多片敷布邊緣須交錯 6~8mm。

軟膏條(管、瓶)使用說明-

1. 每次用軟膏前傷口以林格溶液(Ringer solution)、高滲透溶液(生理食鹽水)清洗乾淨。
2. 軟膏塗於傷口一層 1~2mm 厚。用無菌敷料(紗布、不織布敷料)鋪在軟膏敷布上，可保護產生有利的癒合環境。敷料依傷口演變每天或每兩天更換。

副作用

1. 在敷上後立即局部熱熱的或不舒服感覺，有時可能出現周圍充血；此現象在 30 至 40 分鐘內消失。
2. 在癒合過程中，會出現輕微的癢，在這種情況下為了不損傷新形成的皮膚，應要避免抓傷表皮，必要時可尋求醫生的意見。
3. 對軟膏中的成份如果有局部過敏副作用，可詢問醫生或藥劑師。

使用注意事項：

- 浸漬敷布、軟膏管、軟膏條(瓶) 不應用於對任何成分過敏的人。
- 如果有局部感染的跡象，要醫生的允許下才可繼續敷用此產品。
- 使用前檢查包裝的完整性，產品包裝有損壞便不可使用。
- 浸漬敷布(型號 CIM010)僅限單次使用。
- 因本產品含有樟腦成分，故不適用於患有蠱豆症之患者。

其他注意事項：

產品過期後，即不應使用。請置放在小孩拿不到之處。

儲存溫度需在 25°下，原廠包裝有防潮、光和熱。

藥商名稱: 松安醫療器材有限公司

藥商地址:彰化縣溪湖鎮田中里田中央路 2 段 190 巷 152 號

製造廠名稱: S.C. BIOTIFARM S.R.L.

製造廠地址: Str. Grigore Antipa nr. 3, Timisoara, jud. Timis, Romania