

“雷力恩”萊邦光固化黏著劑

“Reliance” Light Bond Light Cure Sealant & Bracket Bonding System

衛部醫器輸字第 033748 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

型號

Light Bond

產品說明及用途

本產品可用黏合任何牙釉質，陶瓷，複合樹脂或金屬表面。

它可用光固化方式做托架和舌側維持器的黏著。

使用說明

預防：

使用橡皮杯狀或毛刷狀旋轉器械，預防琺瑯質表面與拋光浮石黏結。不要使用含有油的糊劑，因為它們會留下會抑制酸蝕的薄膜。用無油和無水壓縮空氣徹底沖洗並吹乾牙齒。

酸蝕：

隔離牙齒進行酸蝕。使用棉布或刷子，將酸蝕劑輕輕塗抹在整個待黏合的區域上。不要在琺瑯質上摩擦酸蝕劑。酸蝕需要 30 秒（乳牙為 60 秒）。避免將酸蝕劑塗在軟組織上。

沖洗&吹乾：

用水和噴霧徹底沖洗，以適當清潔琺瑯質表面。用大量水沖洗每顆牙齒 5 秒（凝膠酸蝕 10 秒）以中止酸蝕過程並移除去礦化粒子。徹底分離並吹乾牙齒。酸蝕區域應呈現為灰白色。如果沒有，再重新酸蝕 20 秒。如果琺瑯質呈現氟斑或已被唾液汙染，應使用 Assure Universal Bonding Resin 對琺瑯質進行調整。

封閉劑應用：

將一滴或兩滴 Assure，Assure Plus 或 Light Bond 封閉劑分配到混合板上。用刷子在酸蝕的琺瑯質上塗一層薄薄的封閉劑。此時不需光固化封閉劑。然而，光固化封閉劑可以防止托架浮動。

黏著膏應用：

使用調拌刀塗抹萊特光固化黏著劑並將其放入托架底座中。將托架放在牙齒上並按壓到所需位置。從切緣處光固化 10 秒再從牙齦，近心面或遠心面托架邊緣光固化 10 秒。光照燈必須在固化過程中盡可能靠近托架底座放置。一旦黏著劑已經適當固化，就可以立即放置活動弧線。

注意：光固化時間取決於固化光的強度。

人工表面的黏著：

請參閱 Assure Universal Bonding Resin 或 Assure Plus 黏著樹脂說明。

托架移除：

要移除本產品，請使用矯正用鉗鉗住托架接觸面的黏著劑並將托架從牙齒上剝離。大部分黏著劑將在托架底座內移除。使用 Renew Finishing System Bur 和 Renew Finishing System # 383 Point 可以移除剩餘的材料。

注意

- 1) 毛刷塗佈器，口內用管頭和混合板是拋棄式產品。每位患者需使用新的毛刷塗佈器、本產品專用的口內用管頭和混合板。調拌刀和混合孔板可以在高壓滅菌或化學消毒後重覆使用。
- 2) 使用紫外線，鹵素燈和 LED 光固化燈可能會導致眼睛損傷。使用這些光固化設備時，患者，醫生和助理應穿戴設計良好的防護眼鏡。
- 3) 未聚合的樹脂如 Light Bond Adhesive 可能會引發易感染對象的皮膚敏感。如果接觸皮膚，請用肥皂和水徹底清洗。如果意外地滴入眼睛，請用大量的水沖洗並立即就醫。與其他組織接觸：立即用大量水沖洗材料接觸區域幾分鐘。
- 4) 在室溫下儲存 (攝氏 15-30 度)。避免過熱。使用前讓產品達到室溫。
- 5) 分配的封閉劑和糊劑不應長時間暴露在直射光下，因為可能會發生材料局部活化。糊劑可以預先應用於托架，但必須遮蔽環境光 (用盒蓋遮蔽)。

型號規格

REF#LBEPF	Light Bond ECONOMY PUSH SYRINGE KIT with Fluoride 1 x mixing pad, 1 x 23 gm liquid etchant 2 x spatulas, 1 x 50 pack brushes 5 gm x 4 push Light Bond light cure adhesive paste contains fluoride (#LBPPF) 2 x 3cc Light Bond light cure sealant resin (LBS3F for fluoride)
REF#LBETF	Light Bond Tip KIT with Fluoride 1 x mixing pad, 1 x 23 gm liquid etchant, 2 x spatulas, 1 x 50 pack brushes 5 gm x 4 x 11 tips Light Bond light cure adhesive paste contains fluoride (#LBPTF) 2 x each 3cc Light Bond light cure sealant resin (LBS3F for fluoride)
REF#LBPPF	5 gm x 4 push Light Bond light cure adhesive paste contains fluoride
REF#LBPTF	5 gm x 4 x 11 tips Light Bond light cure adhesive paste contains fluoride
REF#LBS3F	3 cc bottle Light Bond light cure sealant resin contains fluoride
REF#LBS7F	7 cc bottle Light Bond light cure sealant resin contains fluoride

製造廠名稱及地址: Manufactured by BISCO, INC. (Address : 1100 WEST IRVING PARK RD, SCHAUMBURG, IL 60193, U.S.A.) for RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS, INC. (Address : 1540 WEST THORNDALE AVENUE ITASCA, IL 60143 USA)

藥商名稱: 新雅貿易有限公司

藥商地址: 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)