

“善德” 三方輸液活栓

“Sunder” Three Way Stopcock

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

衛署醫器製字第 001361 號

產品用途

善德生化科技股份有限公司所製造之三方輸液活栓(Three way stopcock)是經由環氧乙烷(Ethylene oxide, E.O.)滅菌，為一次性使用之醫療器材。本產品主要適用於注射輸液因外觀透明，輸液時易於觀察；在輸液的過程中可利用活栓調整，可同時輸入兩種液體，或個別輸入兩種液體。活栓上標示明顯，可以指出停止輸液之方向，及方便人員操作。輸液入口為盧耳(Luer)設計，能確實與機器或其它連接頭銜接而不滲漏。產品活栓區分為紅、藍兩色，紅色三方輸液活栓適用於動脈輸液，藍色三方輸液活栓適用於靜脈輸液使用。

適應症

用於注射輸液。

適用單位

用於注射輸液及其它適用單位等。

臨床使用方式及適應症

用於輸液時，可同時輸入兩種液體，適用於需要點滴輸液之用途。

禁忌症：無

併發症：無

副作用：無

警告

本產品嚴禁非合格醫護人員使用。

操作說明

輸液時將三方活栓，連接於待輸液之各連接頭上，利用活栓鈕，切換所需之輸液程序。

注意事項

1. 保管時的注意事項

1.1 注意勿使物品淋溼，避免陽光直射及高溫潮溼，請保管於清潔的場所。

1.2 搬運、保管時，避免震動或衝撞等。

2. 使用前的注意事項

2.1 當本項產品本體或滅菌包裝出現破損、污損時，請勿使用。

2.2 本項製品採無菌包裝，請即將使用才從滅菌包裝取出並於清潔的場合使用。

3. 其他注意事項

3.1 本產品限一次性使用。

3.2 其他發生異常的情況時，請在醫師的指導下適切的予以處置。

3.3 禁止使用揮發性液體擦拭及避免用途外其他使用。

型號規格

產品型號	顏色	旋轉陽式	陽式
S-29-001-A	藍色		✓
S-29-002-A	紅色		✓
S-29-003-A	藍色	✓	
S-29-004-A	紅色	✓	

藥 商：善德生化科技股份有限公司

地 址：403 台中市西區五權路 1-67 號 10F-1

電 話：04-23755650

傳 真：04-23755651

製造商：善德生化科技股份有限公司褒忠廠

地 址：634 雲林縣褒忠鄉中民村中正路 16 號

電 話：05-6976985

傳 真：05-6976986