

Scanéo

"豪展"非接觸式紅外體溫計
"AVITA" TOUCH FREE Infrared Thermometer



型號：NT16

衛部醫器陸輸字第 001265 號

批號：批號標示於產品本體內

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書，並遵照指示使用

製造日期：如標籤所示

目錄

產品簡介及用途	1
重要注意事項	2
產品功能與按鍵說明	3
螢幕顯示符號說明	4
4 種設定模式：人體、物體、人體/夜間、物體/夜間	5
單位切換功能	5
記憶功能	5
量測方式介紹：人體模式	6
量測方式介紹：物體模式	7
電池安裝說明	8
產品清潔方式說明	8
常見問題解決	9
產品規格說明	10

產品簡介及用途

產品用途: 量測體溫

首先非常感謝您選擇本產品，本產品可以經由人體額頭部位，快速量測體溫。

本產品具有以下特點：


1. 六合一功能：
人體模式/ 物體模式/ 夜間靜音模式/ 發燒警示/ 記憶功能/ 背光功能
2. 夜間模式：
轉換至夜間模式可減少提示音對於寶寶睡眠的干擾。
3. LED 發燒警示燈：
當人體模式下量測值 ≥ 38 度，LED 燈會亮起和發出嗶聲警示。
4. 30 組記憶功能。
5. 背光功能：量測完畢時，會伴隨讀值顯示背光，增加夜間易讀性。
6. 溫度單位切換功能。
7. 快速量測讀值。
8. 自動省電裝置設計：閒置時，自動關閉電源。
9. 低電量提示功能。
10. LCD 大液晶顯示螢幕，易於讀取。

重要注意事項

當使用本產品時，請確實遵守下列注意事項，以免影響自身安全與量測準確度。



1. 患者僅通過測量結果進行自我判斷和治療是很危險的，所以請務必遵照醫師的指導。
2. 本產品任何時間測量的結果僅供個人參考，無法取代專業醫師的醫療診斷結果；若對您個人的體溫測量結果有任何疑慮，請在醫師正確指導下使用和診斷。
3. 量測感應器請避免手指觸摸，並請勿自行拆卸或重新組裝本產品。
4. 請注意量測感應器的清潔，每次使用後應擦拭量測感應器。
5. 被測者在剛做完運動後，沐浴或剛從戶外進入室內，此時被測者額頭部會有水氣未乾，請勿進行體溫測量，被測者應至少在測量環境 30 分鐘，待與測量環境溫度一致後再進行測量，以免影響測量的準確度。
6. 當本產品從與待測環境溫度差異較大的地方取出使用時，應將本產品放置在待測環境中至少 30 分鐘後再使用。
7. 請依出貨說明書的儲存環境溫度及濕度保存本產品，請勿將本產品置於溫度/濕度過高或陽光直接曝曬之環境下。
8. 避免劇烈震動本產品或由高處落下，造成產品本身之損傷。
9. 本產品建議每一年校正一次準確度。
10. 電池拋棄必須符合當地環境與機構政策。

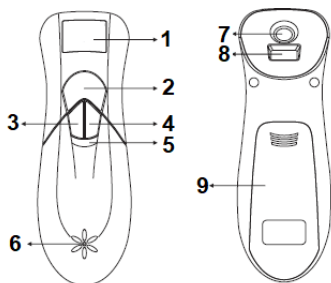產品功能與按鍵說明



1	液晶顯示螢幕
2	電源及溫度量測鍵
3	模式切換鍵
4	記憶鍵
5	LED 燈
6	出音孔
7	量測感應器
8	距離偵測器
9	電池蓋

螢幕顯示符號說明

	量測進行中
	夜間模式(靜音模式)
	人體模式
	物體模式
	數字顯示
	溫度符號(攝氏)
	溫度符號(華氏)
	電量不足符號
	笑臉符號($< 38^{\circ}\text{C}$)
	哭臉符號($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
	量測值符號(記憶筆數)

4 種設定模式：人體、物體、人體/夜間、物體/夜間

1. 本產品提供了 4 種設定模式，可使用白天或晚上，人體或物體測量。
2. 當溫度計在開啟狀態時，按下「模式鍵」，即可切換"人體模式"、"物體模式"、"人體/夜間模式"、"物體/夜間模式"的設定。
3. 當"夜間模式"啟動時，液晶顯示螢幕會出現“夜間模式(靜音模式)”符號，此時測量過程無聲音提醒。

單位切換功能

當溫度計在開啟狀態時，同時按下「模式鍵」與「記憶鍵」即可作攝氏(°C)與華氏(°F)溫度之量測切換。

記憶功能

讀取記憶功能：

1. 本產品提供 30 組的記憶儲存、查詢。
2. 開機狀態下，按下「記憶鍵」，會顯示最近一次溫度測量數值。
3. 繼續按下「記憶鍵」，可依次查詢量測記錄值。

清除記憶值：

取下電池即可清除所有記錄。

量測方式介紹：人體模式

1. 首先按下「電源及溫度量測鍵」以開啟本產品，此時所有符號均會顯示於液晶顯示螢幕中。
2. 此時液晶顯示螢幕上會顯示"人體模式"符號，即代表本產品已做好人體模式量測準備。或按下模式切換鍵以切換到人體模式。
3. 如果皮膚有頭髮遮擋、汗液或沙塵，量測前先清潔皮膚區域並等待約 10 分鐘。
4. 確定為"人體模式"後，先將量測感應器對準額頭距離約 0.5-3 公分處(盡量靠近但不要碰到額頭)，按一下「電源及溫度量測鍵」進行量測。
5. 待聽到一短嗶聲後，表示量測完畢，量測結果將示於液晶顯示螢幕上，此時即可移開紅外線體溫計。
6. 如果溫度量測數值低於 38°C，笑臉符號會顯示在螢幕上。如果溫度量測數值高於 38°C，哭臉符號會顯示在螢幕上且 LED 燈會亮起。
7. 當待機 30 秒後會自動關機，以節省電池耗電。
8. 發燒警示僅限於人體模式和人體/夜間模式。

量測方式介紹：物體模式

1. 首先按下「電源及溫度量測鍵」以開啟本產品。
2. 按壓「模式鍵」切換到“物體模式”，確認液晶顯示螢幕顯示在“物體模式”下。
3. 將量測感應器靠近被測物體距離約 2-3 公分處(但不要碰到被測物體)，此時按壓一下「電源及溫度量測鍵」後鬆開。
4. 鬆開「電源及溫度量測鍵」後讀值會顯示在螢幕上。
5. 當待機 30 秒後會自動關機，以節省電池耗電。

電池安裝說明

電量不足警示：

- (1) 當“電量不足”符號出現於液晶顯示螢幕時，即代表電池電量即將不足，此時請準備兩顆 AAA 電池，並將原有之電池取出更換。
- (2) 在“電量不足”符號出現後，您仍可使用本產品直到“電量不足”符號與“Lo”符號同時出現於液晶顯示螢幕並發出“嗶”聲為止。

電池安裝程序：

第一步：打開「電池蓋」。

第二步：請使用兩顆 AAA 電池，將電池置入電池座。

第三步：將「電池蓋」蓋上。

產品清潔方式說明

(1)量測感應器：

為避免病菌傳染，於每次完成溫度量測後，請確實以棉花棒沾酒精進行量測感應器之清潔工作。(注意：請勿直接將本產品置於水龍頭下清洗)。

(2)產品本體：

請以輕柔之乾布擦拭本產品，以避免造成產品本身之刮傷，注意勿以清水直接沖洗本產品。

常見問題解決

螢幕顯示	原因	解決方式
	當目標物之溫度低於測量範圍： 人體模式：34°C (93.2°F)	1. 當量測感應器於量測過程中未妥善放置於額頭時，其量測結果值可能偏低。
	當目標物之溫度高於測量範圍： 人體模式：43°C (109.4°F)	2. 當量測感應器髒污，其量測結果值可能偏低，將量測感應器以棉花棒沾酒精妥善清洗。
	本產品之操作環境限制為 15°C ~ 40°C (59°F ~ 104°F) 之間，當環境溫度超出此範圍時，螢幕中會出現 "Err"。	操作本產品時，環境溫度不可以超出此範圍時。
	電量不足，以致無法量測	請更換全新之電池

產品規格說明

(1) 量測溫度範圍：

人體：34°C~43°C (93.2°F ~ 109.4°F)

物體：0°C~100°C (32°F ~ 212°F) (非屬醫療效能)

(2) 量測準確度：

人體：34°C-43°C ± 0.2°C (93.2°F ~ 109.4°F ± 0.4°F)

物體：40°C以下: ± 2°C (104°F 以下: ± 4°F)

大於 40°C: ± 5% (大於 104°F: ± 5%)

(3) 溫度顯示解析度：0.1°C或°F

(4) 操作環境限制：

15°C ~ 40°C (59°F ~ 104°F)(相對溼度必須保持於 95% 以內)

(5) 儲存運送環境限制：

-25°C ~ 55°C (-13°F ~ +131°F) (相對溼度必須保持於 95% 以內)

(6) 電池：2 顆 1.5V AAA 電池

(7) 重量：大約 87g (含電池)

(8) 記憶組數: 30 組

(9) 尺寸：129.9X44.5X52.4 mm (L×W×H)

醫療器材商 名稱： 豪展醫療科技股份有限公司

醫療器材商 名稱： 依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載

地址： (市售品須刊載實際地址)

製造業者 名稱/地址： Manufactured by AViTA (WuJiang) CO., LTD (No. 858, Jiao Tong Road, Wujiang Economic Development Zone, Jiang Su Province, China) for 豪展醫療科技股份有限公司(新北市三重區光復路一段 78 號 9 樓)

Aug. 11, 2021

Scanéo

"豪展"非接觸式紅外體溫計
"AVITA" TOUCH FREE Infrared Thermometer



型號：NT19

衛部醫器陸輸字第 001265 號

批號：批號標示於產品本體內

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書，並遵照指示使用

製造日期：如標籤所示

目錄

產品簡介及用途	3
重要注意事項	4
產品功能與按鍵說明	5
螢幕顯示符號說明	6
4 種設定模式：人體、物體、人體/夜間、物體/夜間	7
單位切換功能	7
記憶功能	7
量測方式介紹：人體模式	8
量測方式介紹：物體模式	9
電池安裝說明	10
產品清潔方式說明	11
常見問題解決	12
產品規格說明	13

產品簡介及用途

產品用途: 量測體溫

本產品用途為家用並且不連續量測人體額頭部位，適用於各年齡層。

本產品具有以下特點：


1. 具備一機多用途功能：
人體額溫、物體、夜間模式、發燒警示、背光功能。
2. 夜間模式：
當切換至夜間模式，可以將喇叭關閉，以減少寶寶睡眠之干擾。
3. LED 發燒警示燈(僅適用於人體模式)
< 38.0°C · LCD 螢幕顯示"笑臉符號"
≥38.0°C · LCD 螢幕顯示"哭臉符號" + "LED 燈" + 嗶聲
4. 30 組記憶功能。
5. 背光功能：量測完畢時，會伴隨讀值顯示背光，增加夜間易讀性。
6. 溫度單位切換功能。
7. 快速量測。
8. 自動省電裝置設計：閒置時，自動關閉電源。
9. 低電量提示：
電量指示符號以及可量測溫度範圍。
10. LCD 大液晶顯示螢幕，易於讀取。

重要注意事項

當使用本產品時，請確實遵守下列注意事項，以免影響自身安全與量測準確度。



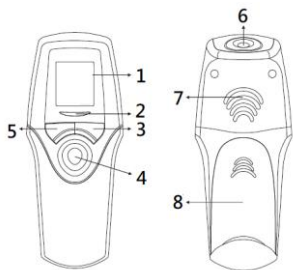

1. 患者僅通過測量結果進行自我判斷和治療是很危險的，所以請務必遵照醫師的指導。
2. 本產品任何時間測量的結果僅供個人參考，無法取代專業醫師的醫療診斷結果；若對您個人的體溫測量結果有任何疑慮，請在醫師正確指導下使用和診斷。
3. 量測感應器請避免手指觸摸，並請勿自行拆卸或重新組裝本產品。
4. 請注意量測感應器的清潔，每次使用後應擦拭量測感應器。
5. 使用本產品測量額溫前注意清潔額頭汗液或無頭髮遮擋。
6. 被測者在剛做完運動後，沐浴或剛從戶外進入室內，此時被測者額頭部會有水氣未乾，請勿進行體溫測量，被測者應至少在測量環境 30 分鐘，待與測量環境溫度一致後再進行測量，以免影響測量的準確度。
7. 當本產品從與待測環境溫度差異較大的地方取出使用時，應將本產品放置在待測環境中至少 30 分鐘後再使用。
8. 請依出貨說明書的儲存環境溫度及濕度保存本產品，請勿將本產品置於溫度/濕度過高或陽光直接曝曬之環境下。
9. 避免劇烈震動本產品或由高處落下，造成產品本身之損傷。
10. 本產品建議每一年校正一次準確度。
11. 電池拋棄必須符合當地環境與機構政策。

產品功能與按鍵說明



- 1 液晶顯示螢幕
- 2 LED燈
- 3 模式鍵
- 4 電源及溫度量測鍵
- 5 記憶鍵
- 6 量測感應器
- 7 出音孔
- 8 電池蓋

螢幕顯示符號說明

	量測進行中
	夜間模式(靜音模式)
	人體模式
	物體模式
	數字顯示
	溫度符號(攝氏)
	溫度符號(華氏)
	電量不足符號
	笑臉符號($< 38^{\circ}\text{C}$)
	哭臉符號($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
	量測值符號(記憶筆數)

4 種設定模式：人體、物體、人體/夜間、物體/夜間

1. 當本產品在開啟狀態時，按下「模式鍵」，即可切換"人體模式"、"物體模式"、"人體/夜間模式"、"物體/夜間模式"的設定。
2. 當"夜間模式"啟動時，液晶顯示螢幕會出現“夜間模式(靜音模式)”符號，此時測量過程無聲音提醒。

單位切換功能

當本產品在開啟狀態時，同時按下「模式鍵」與「記憶鍵」即可作攝氏(°C)與華氏(°F)溫度之量測切換。

記憶功能

讀取記憶功能：

1. 本產品提供 30 組的記憶儲存、查詢。
2. 開機狀態下，按下「記憶鍵」，會顯示最近一次溫度測量數值。
3. 繼續按下「記憶鍵」，可依次查詢量測記錄值。

清除記憶值：

取下電池即可清除所有記錄。

量測方式介紹：人體模式

1. 首先按下「電源及溫度量測鍵」以開啟本產品，此時所有符號均會顯示於液晶顯示螢幕中。
2. 此時液晶顯示螢幕上會顯示"人體模式"符號，即代表本產品已做好人體模式量測準備。
3. 如果皮膚有頭髮遮擋、汗液或沙塵，量測前先清潔皮膚區域並等待約 10 分鐘。
4. 確定為"人體模式"後，先將量測感應器對準額頭距離約 0.5-3 公分處(盡量靠近但不要碰到額頭)，按一下「電源及溫度量測鍵」進行量測。
5. 待聽到一短嗶聲後，表示量測完畢，量測結果將示於液晶顯示螢幕上，此時即可移開紅外線體溫計。
6. 如果溫度量測數值低於 38°C，笑臉符號會顯示在螢幕上。如果溫度量測數值高於 38°C，哭臉符號會顯示在螢幕上且 LED 燈會亮起。
7. 當待機 30 秒後會自動關機，以節省電池耗電。
8. 發燒警示僅限於人體模式和人體/夜間模式。

量測方式介紹：物體模式

1. 首先按下「電源及溫度量測鍵」以開啟本產品。
2. 按壓「模式鍵」切換到“物體模式”，確認液晶顯示螢幕顯示在“物體模式”下。
3. 將量測感應器靠近被測物體距離約 0.5-3 公分處(但不要碰到被測物體)，此時按壓一下「電源及溫度量測鍵」後鬆開。
4. 鬆開「電源及溫度量測鍵」後讀值會顯示在螢幕上。
5. 當待機 30 秒後會自動關機，以節省電池耗電。

電池安裝說明

電量不足警示：

1. 當“電量不足”符號出現於液晶顯示螢幕時，即代表電池電量即將不足，此時請準備兩顆 AAA 電池，並將原有之電池取出更換。
2. 在“電量不足”符號出現後，您仍可使用本產品直到“電量不足”符號與“Lo”符號同時出現於液晶顯示螢幕並發出“嗶”聲為止。

注意：

如果電池安裝方式錯誤，將會有爆炸風險。

請依照說明書指示丟棄使用過的電池。

電池安裝程序：

1. 打開「電池蓋」。
2. 請使用兩顆 AAA 電池，將電池置入電池座。
3. 將「電池蓋」蓋上。

電池使用注意事項

1. 將廢棄電池置於遠離孩童可拿取處並且遠離火源。
2. 建議若長時間不使用本產品，請將電池取出。
3. 丟棄廢電池請遵循地方級機構法規，請勿將廢棄電池丟入一般家庭垃圾中。

產品清潔方式說明

針對家用器材之清潔，可以使用 75%酒精。


1. 量測探頭：

為避免病菌傳染，於每次完成溫度量測後，請確實以棉花棒沾酒精進行量測感應器之清潔工作。(注意：請勿直接將本產品置於水龍頭下清洗)。

2. 產品本體：

請以輕柔之乾布擦拭本產品，以避免造成產品本身之刮傷，注意勿以清水直接沖洗本產品。

常見問題解決

螢幕顯示	原因	解決方式
Lo	當目標物之溫度低於測量範圍： 人體模式：34°C (93.2°F) 物體模式：0°C (32.0°F)	1. 當量測感應器於量測過程中未妥善放置於額頭時，其量測結果值可能偏低。
Hi	當目標物之溫度高於測量範圍： 人體模式：43°C (109.4°F) 物體模式：100°C (212.0°F)	2. 當量測感應器髒污，其量測結果值可能偏低，將量測感應器以棉花棒沾酒精妥善清洗。
Err	本產品之操作環境限制為 15°C ~ 40°C (59°F ~ 104°F) 之間，當環境溫度超出此範圍時，螢幕中會出現 "Err"。	操作本產品時，環境溫度不可以超出此範圍時。
Lo ⁺ 	電量不足，以致無法量測	請更換全新之電池

產品規格說明

(1) 量測溫度範圍：

人體：34°C~43°C (93.2°F ~ 109.4°F)

物體：0°C~100°C (32°F ~ 212°F) (非屬醫療效能)

(2) 量測準確度：

人體：34°C-43°C ± 0.2°C (93.2°F ~ 109.4°F ± 0.4°F)

物體：40°C以下: ± 2°C (104°F 以下: ± 4°F)

大於 40°C: ± 5% (大於 104°F: ± 5%)

(3) 操作環境限制：

15°C ~ 40°C (59°F ~ 104°F)(相對溼度必須保持於 95% 以內)

(4) 儲存運送環境限制：

-25°C ~ 55°C (-13°F ~ +131°F) (相對溼度必須保持於 95% 以內)

(5) 溫度顯示解析度：0.1°C或°F

(6) 自動關機時間: 閒置時，自動關閉電源

(7) 記憶組數: 30 組

(8) 電池：2 顆 1.5V AAA 電池

(9) 尺寸：123.0 x50.5 x49.0mm (L×W×H)

(10) 重量：大約 80g (含電池)

醫療器材商 名稱： 豪展醫療科技股份有限公司

醫療器材商 地址： 依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載
(市售品須刊載實際地址)

製造業者 名稱/地址： Manufactured by AViTA (WuJiang) CO., LTD (No. 858,
Jiao Tong Road, Wujiang Economic Development
Zone, Jiang Su Province, China) for 豪展醫療科技股份有
限公司(新北市三重區光復路一段 78 號 9 樓)

Aug. 11, 2021

NT16



NT19

