


醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“因諾美”神經監測儀及其配件	申請廠商	企建科技股份有限公司
--------	----------------	------	------------

非滅菌產品

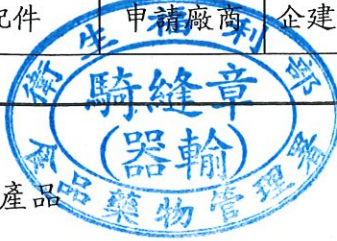

108. 8. 07

中文品名：“因諾美”神經監測儀及其配件

製造批號：

製造日期或保存期限：

許可證字號：衛部醫器輸字第 026798 號

製造廠名稱：inomed Medizintechnik GmbH

製造廠地址：Im Hausgrün 29, D-79312 Emmendingen, Germany

藥商名稱：企建科技股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

滅菌產品



108. 8. 07

中文品名：“因諾美”神經監測儀及其配件

製造批號：

製造日期及有效期間或保存期限：

許可證字號：衛部醫器輸字第 026798 號

製造廠名稱：inomed Medizintechnik GmbH

製造廠地址：Im Hausgrün 29, D-79312 Emmendingen, Germany

藥商名稱：企建科技股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文仿單。但如市售醫療器材同時放置中、外文仿單者，外文仿單內容須與核定本之中文仿單內容相符。

醫療器材仿單標籤粘貼表



產品中文名稱	“因諾美”神經監測儀及其配件	申請廠商	企建科技股份有限公司
--------	----------------	------	------------



Tubus-Klebelektrode
für Tuben von 6-7mm Innendurchmesser

Inomed laryngeal electrode
for tube with 6-7 mm inner diameter

Electrode autocollante larynx
pour sondes endotrachéales de 6 à 7 mm

Inomed Medizintechnik GmbH
Im Hausgruen 29
79312 Emmendingen
GERMANY

108.8.07

REF 530655 pc. 10 STERILEEO Rx only LOT 19G001D

+EINO53065590

2021-07-24

+55°C
-29°C

2019-07-24
inomed
www.inomed.com

100000

Einmal Vokallektrode 15mm
bipolar, mit Neutralelektrode;

Disposable electrode 15 mm
bipolar, for vocal muscle

Electrode pour cordes vocales
15 mm, avec référence

Inomed Medizintechnik GmbH
Im Hausgruen 29
79312 Emmendingen
GERMANY

REF 530666 pc. 10 STERILEEO Rx only LOT 19G001D

+EINO5306669Q

2024-07-24

+55°C
-29°C

2019-07-24
inomed
www.inomed.com

100000

SDN Elektrode Trigon BL
15/1000, Edelstahl

SDN electrode Trigon BU
15/1000, stainless steel

Electrode aiguille Trigon BU
15/1000, acier inoxydable

Inomed Medizintechnik GmbH
Im Hausgruen 29
79312 Emmendingen
GERMANY

REF 532621 pc. 10 STERILEEO Rx only LOT 19G001D

+EINO5326219J

2024-07-24

+55°C
-29°C

2019-07-24
inomed
www.inomed.com

100000


108.8.0

※
※
※

醫療器材仿單標籤粘貼表



產品中文名稱	“因諾美”神經監測儀及其配件	申請廠商	企建科技股份有限公司
--------	----------------	------	------------

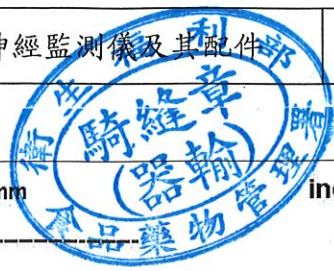

108. 8. 07

Oculomotoriuselektrode NL=30mm bipolar, 1,5mm Sich.-Stecker	inomed Medizintechnik GmbH Im Hausgruen 29 79312 Emmendingen GERMANY
Oculomotorius electrode bipolar, needle 30 mm	
Electrode bipolaire pour nerf oculomoteur	
REF 532710 pc. 5	STERILE EO Rx only LOT 19G001D
+EINO5327109I	CE 0297 2024-07-24
+\$\$805207242419G001D/16D20190724I	2019-07-24 inomed www.inomed.com

000001

SDN Elektroden RT/SW 6/1500, Edelstahl	inomed Medizintechnik GmbH Im Hausgruen 29 79312 Emmendingen GERMANY
SDN electrodes RD/BK 6/1500, stainless steel	
Electrodes aiguilles RG/NR 6/1500, acier inoxyidable	
REF 532720 pc. 10	STERILE EO Rx only LOT 19G001D
+EINO5327209J	CE 0297 2024-07-24
+\$\$810207242419G001D/16D20190724JZ	2019-07-24 inomed www.inomed.com

000001

SDN Elektrode BL 15/1000, Edelstahl	inomed Medizintechnik GmbH Im Hausgruen 29 79312 Emmendingen GERMANY
SDN electrode BU 15/1000, stainless steel	
Electrode aiguille BU 15/1000, acier inoxyidable	
REF 533621 pc. 10	STERILE EO Rx only LOT 19G001D
+EINO5336219K	CE 0297 2024-07-24
+\$\$810207242419G001D/16D20190724K-	2019-07-24 inomed www.inomed.com

000001

醫療器材仿單標籤粘貼表



產品中文名稱 “因諾美”神經監測儀及其配件 申請廠商 企建科技股份有限公司

Mikrogabelsonde 45mm gerade

 Micro fork probe 45mm straight

 Microsonde fourche 45mm droite

inomed Medizintechnik GmbH
 Im Hausgruen 29
 79312 Emmendingen
 GERMANY

000001

REF **522610** pc. 10 STERILEEO Rx only LOT 19G001D

 0297 2024-07-24

+EINO5226109G

 +55°C / -29°C 2019-07-24
inomed www.inomed.com

+\$810212129919G001D/16D20190724G.

DELTA-Elektrode

 DELTA Electrode

 Electrode DELTA

inomed Medizintechnik GmbH
 Im Hausgruen 29
 79312 Emmendingen
 GERMANY

000001

REF **522620** pc. 5 STERILEEO Rx only LOT 19G001D

 0297 2024-07-24

+EINO5226209H

 +55°C / -29°C 2019-07-24
inomed www.inomed.com

+\$805207242419G001D/16D20190724H.

Stimulationssonde 45mm monopolar, abgewinkelt 30°

 Stimulation probe 45mm monopolar, angled 30°

 Sonde de stimulation 45mm Monopolaire, courbée à 30°

inomed Medizintechnik GmbH
 Im Hausgruen 29
 79312 Emmendingen
 GERMANY

000001

REF **525603** pc. 10 STERILEEO Rx only LOT 19G001D

 0297 2024-07-24

+EINO5256039L

 +55°C / -29°C 2019-07-24
inomed www.inomed.com

+\$810207242419G001D/16D20190724L.



8. 8. 07

“因諾美”神經監測儀及其配件

“Inomed” C2 NerveMonitor with Accessories

衛部醫器輸字第 026798 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

型號: 508240、508280

1. 產品敘述

1.1 產品敘述

本產品代表連續雙刺激器神經監測儀。

本產品的基本功能是用於記錄肌電圖信號和對周邊神經的刺激。因此，透過於其合適的配件一併使用。

本產品可配備 4 個或者 8 個放大器通道；每個通道均可作微分記錄。每台監測儀都具有 2 個獨立刺激通道。

所有設備元件可以通過其整合式軟體及使用者操作介面來做調整。

1.2 配件

根據設備及用途可以使用專門的配件進行刺激和記錄。

2. 安全性

2.1 產品用途

本產品可於手術中辨識頭顱及周邊之運動神經或感覺神經，並進行監控其功能性。

本產品有兩個用途，一是使用自動或感應功能辨識頭顱和周邊神經組織，二是監測手術中這些結構的交互作用。

本產品適用症狀如下：

顱內/外手術、顱內/外手術、頸部切除手術，胸腔手術及上下肢手術。

對於脊手術，本產品適用於：

退化性脊髓治療，椎弓根手術，椎間融合術，脊神經切斷手術，骨科手術，開放式和經皮之腰和頸椎外科手術及胸腔手術。

該系統不是用來監測生命維繫功能。

此系統無法診斷腦死。

2.3.1 儲存與使用環境

- 儀器應保持相對濕度在 30% - 50%，溫度保持在5⁰C -40⁰C的環境內，對系統進行儲存、運輸及使用。
- 避免任何液體滲入設備內。

2.3.2 一般安全注意事項

- 避免系統和系統元件遭到碰撞並且避免任何機械損傷。
- 每次使用前，檢查系統是否存在物理損壞。
- 嚴禁使用損壞的元件。
- 鑒於高電壓會造成觸電風險，只能由授權人員在維護和維修的情況下打開系統及其附件。
- 請遵守相關的醫療儀器法規。



警告

嚴禁對設備進行改裝。隨意變更元件將造成儀器損壞



警告

移除設備的保護裝置可能會危害健康或者導致設備損壞。



警告

嚴禁在具有爆炸風險的區域使用該系統。




危險

避免應用元件與其它導電元件以及接地安全引線間發生意外接觸!

若要將該系統用作其它用途,請事先聯繫原廠或您的專業經銷商。

2.5 清潔、消毒和處理系統配件

C2 神經監測儀配件	清潔劑、消毒劑
C2 神經監測儀	使用酒精做清潔和消毒。
患者用電纜	加水稀釋過的溫和清潔劑和用酒精擦拭消毒。 電纜必須先乾燥後，才能收起來。 用高壓滅菌器滅菌可滅菌的連接用電纜，操作溫度為 34°C，

	至少 5 分鐘。 配件的使用要遵守操作手冊的規範	
	絕對不能將患者用電纜浸入水中！	
可重複使用的電極	加水稀釋過的溫和清潔劑 用適當的方法乾燥電極後，才能滅菌。	可使用高壓滅菌器滅菌可重複使用的電極和探頭，操作溫度為 134°C,至少 5 分鐘 單、雙極刺激探頭的使用要遵守操作手冊的規範。

3. C2 神經監測儀描述

3.1 供貨範圍

- C2 神經監測儀的基本組件:
 產品編號: 508240 – 4 通道 EMG 設備 或者
 產品編號: 508280 – 8 通道 EMG 設備
- 操作軟體手冊 C2 EMG Software V2.0(版本 2.0)
- C2 神經監測儀附件
- C2 神經監測儀使用說明書



3. 8. 07

7. 技術資料

7.1 系統分類

記錄和刺激元件	類型 BF
尺寸規格 (寬/高/深)	約 27公分/ 40公分/ 24公分
重量	約 6.5公斤

7.2 電源供應

電源消耗:	100-240 V, 50/60 Hz 約 120VA (max)
保險絲:	2xT3.15A/ 250 V

7.3 採集器

EMG 頻道數:	4 個不同頻道 (可增加至 8 個頻道)
連接:	最多 4 個/8 個
每個通道	
輸入範圍:	0.1~5000Hz
輸入雜訊:	$<1.2 \mu V_{\text{eff}}$
測量範圍:	800 μV_{pp} - 800mV $_{\text{pp}}$
輸入阻抗:	100 Mega Ohm
解析度:	16 Bit
取樣率:	20 kHz
背景值:	1-4 ms
最大容差:	10%

7.4 刺激器

頻道數:	2
連接點:	2, DNS 插頭和 1.5mm 安全插頭
頻寬:	3 Hz/ 30 Hz, 可在 1-30 Hz 範圍調整
極性:	單極, 負矩形脈衝
脈衝寬度:	固定的脈衝寬度 200 μS
電流型式:	直流電
刺激電流:	0.01 mA-25mA
刺激電壓:	$V_{\text{max}}=100V$, 刺激電壓是設定的電流(0.01 – 25 mA)和阻抗(0- 10 k Ω)相乘的結果。刺激電壓的最大值為 100V, 電流的最大值為 25 mA 例如: $V_{\text{max}} = 100 V$, mit $I_{\text{max}} = 25 \text{ mA} \times 4 \text{ k}\Omega$ mit $Z_{\text{max}} 10 \text{ mA} \times 10 \text{ k}\Omega$ 用於外科手術的預設程式的最大電壓為 50 V, 因為其對應的最大電流為 5 mA ($50V=5mA*10k\Omega$).
阻抗負載範圍:	0 Ohm-10 kOhm
直流分量:	0V
電流感應器:	用於顯示電流流動(電流確認)
最大容差:	$\pm 10\%$, ± 1 位元 (0.01 mA)

7.5 系統特性

- 高端音訊放大器和揚聲器
- 可讀取病人資料的條碼掃描器
- 腳踏開關(用於標記測量中的波形，被標記的波形將被用於報告中)
- 用於匯出資料的 USB 介面
- 印表機 USB 介面
- 靜音感應器
- 用於連接外接顯示器或者頂燈的 VGA 介面
- 100MBit 局域網/乙太網
- 4 個觸發輸入 / 4 個觸發輸出
- 不限制數量的使用者自訂程式，在快速啟動功能表內有 5 個程式可供選擇
- 2 個 inomed USB 模組擴展介面 (可選)

8. C2 神經監測儀---配件清單

編號	描述	備註	數量
540425	肌電圖迷你 4 通道電極盒,含接地埠,4x1.5mm 防觸碰連接器 DIN42802,電纜 4m		1 個
520037	DELTA 電極連接線,連接電纜的迷走神經刺激電極-微同軸母頭連接器。設備的公頭連接器：4 極	可重複使用 可消毒	1 條
530669	喉管電極專用屏蔽連接線 (5 x 1.5mm 連接頭 connectors)	可重覆使用 酒精清潔和消毒	1 條
530665	喉管屏蔽電極連接線 S 連接線(5 接頭),5 x 1.5 mm,電纜 4m, 通道 1 與 2 含接地埠,防觸碰連接器 DIN 41801.	可重覆使用 可消毒	1 條
530667	喉管屏蔽電極連接線 S,通道 1 與 2 含接地埠,電纜 4m,Redal 連接器 10 極 40°	可重覆使用 可消毒	1 條
530867	喉管屏蔽電極連接線(4 通道/1 接頭),電纜 4m, Redel 連接器 10 極 40°	可重覆使用 可消毒	1 條
530869	喉管屏蔽電極連接線(2 頻道/5 接頭),5 x 1.5 mm,電纜 4m,防觸碰連接器 DIN 42802.	可重覆使用 可消毒	1 條
520024	DNS 直接刺激電流探頭線,長 4m,紅色矽材質,4 極連接器	可重覆使用 高溫高壓滅菌	1 條
520078	HC 刺激轉接頭,1mm 母連接頭,0.7m 長 522130 使用	可重覆使用 酒精清潔和消毒	1 條

530866	喉管電極防觸碰轉接線	可重覆使用 酒精清潔和消毒	1 條,
530668	喉管屏蔽電極連接線(3 x 1.5mm 連接頭 connectors)	可重覆使用 酒精清潔和消毒	1 條,
530858	Redel 喉管電極轉接線	可重覆使用 酒精清潔和消毒	1 條,
508560	C2 WiFi 套件,1 個		1 個,
508300	銀幕推車,1 台		1 台

● 聲帶肌肉電極(Electrode for vocal muscle)

編號	描述	備註	數量
530666	雙極聲帶肌肉電極,紅黑綠針,長 15mm,30°,電纜長 1.5m,	限單次使用	10 條
530227	雙極聲帶肌肉電極針,長 15mm	可重覆使用 高壓高溫滅菌	1 條
530228	雙極聲帶肌肉電極針,長 25mm	可重覆使用 高壓高溫滅菌	1 條

● 聲帶電刺激器固定握柄(Vocalis Electrode Applicator)

編號	描述	備註	數量
530121	聲帶電刺激器固定握柄可適用於 9mm 針使用	可重覆使用 高壓高溫滅菌	1 個

● 喉管電極(Adhesive electrodes for laryngeal tube)

編號	描述	備註	數量
530655	喉管電極內直徑 6~7mm,2 頻道,中性黏貼電極,黏貼表面長度 32mm,黏膠表面寬度 29mm	限單次使用	10 條
530656	喉管電極內直徑 7.5~9mm,2 頻道,中性黏貼電極,黏貼表面長度 32mm,黏膠表面寬度 37mm	限單次使用	10 條
530855	喉管電極內直徑 6~7mm,4 頻道,中性黏貼電極,黏貼表面長度 32mm,黏膠表面寬度 29mm	限單次使用	10 條
530856	喉管電極內直徑 7.5~9mm,4 頻道,中性黏貼電極,黏貼表面長度 32mm,黏膠表面寬度 37mm	限單次使用	10 條




108. 8. 07

● 雙極刺激探頭(Bipolar Pedicle stimulation Probe)

編號	描述	備註	數量
522130	30cm 雙極刺激探頭,紅色與黑色 1mm 連接,內直徑 1.67mm	可重覆使用 高壓高溫滅菌	1 個

● 皮下針電極(Subdermal Needle electrode,SDN)

編號	描述	備註	數量
532621	皮下針電極三角握柄型藍色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532622	皮下針電極三角握柄型咖啡色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532623	皮下針電極三角握柄型黃色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532624	皮下針電極三角握柄型灰色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532625	皮下針電極三角握柄型綠色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532626	皮下針電極三角握柄型紅色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532627	皮下針電極三角握柄型黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532628	皮下針電極三角握柄型紫色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532629	皮下針電極三角握柄型白色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532651	皮下針電極三角握柄型綠色, 針頭長 20 mm,電纜長 1.5m	限單次使用	10 條
532653	皮下針電極三角握柄型綠色, 針頭長 20 mm,電纜長 3m,	限單次使用	10 條
532631	皮下針電極三角握柄型藍色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532633	皮下針電極三角握柄型黃色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532634	皮下針電極三角握柄型灰色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532638	皮下針電極三角握柄型紫色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
532636	皮下針電極三角握柄型紅色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1.5m	限單次使用	10 條
532637	皮下針電極三角握柄型紅色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 2m	限單次使用	10 條
532656	皮下針電極三角握柄型紅色/黑色, 針頭長 20 mm,電纜長 1.5m	限單次使用	10 條
532657	皮下針電極三角握柄型紅色/黑色, 針頭長 20 mm 電纜長 2m	限單次使用	10 條
532646	皮下針電極三角握柄型,紅/黑,紅/白,藍/黑,藍/白,黃/黑,黃/白,紫/黑,紫/白,灰/黑,灰/白,針頭長 15 mm,電纜長 2m	限單次使用	10 條
532666	皮下針電極三角握柄型,紅/黑,紅/白,藍/黑,藍/白,黃/黑,黃/白,紫/黑,紫/白,灰/黑,灰/白, 針頭長 20 mm,電纜長 2m,	限單次使用	10 條
532671	皮下針電極三角握柄型紅色/黑色, 針頭長 30 mm,電纜長 2m	限單次使用	10 條
532675	皮下針電極三角握柄型紅色/黑色, 針頭長 40 mm,電纜長 2m	限單次使用	10 條

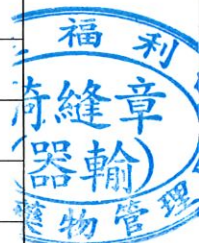

18. 8. 07

532641	皮下針電極三角握柄型紅色/黑色/綠色, 針頭長 15 mm,電纜長 1.5m	限單次使用	10 條
532661	皮下針電極三角握柄型紅色/黑色/綠色, 針頭長 20 mm,電纜長 1.5m	限單次使用	10 條

● 皮下針電極(Subdermal Needle electrode,SDN)

編號	描述	備註	數量
532720	皮下針電極紅色/黑色, 針頭長 6 mm,電纜長 1.5 m	限單次使用	10 條
532722	皮下針電極紅色/黑色, 針頭長 12 mm,電纜長 1.5 m,90°	限單次使用	10 條
532730	皮下針勾狀電極,紅/黑,紅/白,藍/黑,藍/白,黃/黑,黃/白,紫/黑,紫/白,灰/黑,灰/白, 針頭長 30 mm,電纜長 1.5 m,35°	限單次使用	10 條

● 動眼神經深電極(Oculomotorius electrode bipolar)

編號	描述	備註	數量
532710	動眼神經針電極,針長 30mm	限單次使用	5 條
532711	動眼神經針電極,針長 20mm	限單次使用	5 條

● 拋棄式雙極刺激探頭(Disposable bipolar Stimulation Probes)

編號	描述	備註	數量
522610	直式雙極叉狀探頭,長 4.5cm,含握把總長度 15.5cm	限單次使用	10 條
522600	同心軸直式雙極探頭,剃刀狀,長 9cm,含握把總長度 19.5cm	限單次使用	10 條
522629	同心軸直式雙極探頭,長 13cm,含握把總長度 24cm	限單次使用	10 條
522601	同心軸微彎雙極探頭,長 9cm,含握把總長度 19.5cm	限單次使用	10 條
522606	同心軸(Bayonet)雙極探頭,剃刀狀,長 13cm,含握把總長度 24cm	限單次使用	10 條
522630	同心軸微彎(Angled)雙極探頭,長 13cm,含握把總長度 24cm	限單次使用	10 條
522603	同心軸微彎(Angled)雙極探頭,長 4.5cm,含握把總長度 15.5cm	限單次使用	10 條
522605	同心軸雙極(Bayonet)探頭,剃刀狀,長 13cm,含握把總長度 24cm	限單次使用	10 條

● 拋棄式單極刺激探頭(Disposable monopolar Stimulation Probes)

編號	描述	備註	數量
525603	單極微彎探頭,長 4.5cm,2mm 尖頭,直徑 1.3mm	限單次使用	10 條
525608	單極探頭,長 8.5cm,0.4mm 尖頭,直徑 1.4mm,具可彎曲尖頭	限單次使用	10 條
525615	單極刺激探頭,剃刀狀,長 13cm,2.5mm 尖頭,直徑 1.4mm	限單次使用	10 條

● 皮下針電極(Subdermal Needle electrode,SDN)

編號	描述	備註	數量
533621	皮下針電極藍色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533622	皮下針電極咖啡色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533623	皮下針電極黃色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533624	皮下針電極灰色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533625	皮下針電極綠色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533626	皮下針電極紅色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533627	皮下針電極黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533628	皮下針電極紫色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533629	皮下針電極白色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533651	皮下針電極綠色, 針頭長 20 mm,電纜長 1.5m	限單次使用	10 條
533653	皮下針電極綠色, 針頭長 20 mm,電纜長 3m	限單次使用	10 條
533631	皮下針電極藍色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533633	皮下針電極黃色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533634	皮下針電極灰色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533638	皮下針電極紫色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1m	限單次使用	10 條
533636	皮下針電極紅色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 1.5m	限單次使用	10 條
533637	皮下針電極紅色/黑色, 針頭長 15 mm,電纜長 2m	限單次使用	10 條
533656	皮下針電極紅色/黑色, 針頭長 20 mm,電纜長 1.5m	限單次使用	10 條
533657	皮下針電極紅色/黑色, 針頭長 20 mm,電纜長 2m	限單次使用	10 條
533646	皮下針電極,紅/黑,紅/白,藍/黑,藍/白,黃/黑,黃/白,紫/黑,紫/白,灰/黑,灰/白,針頭長 15 mm,電纜長 2m	限單次使用	10 條
533666	皮下針電極,紅/黑,紅/白,藍/黑,藍/白,黃/黑,黃/白,紫/黑,紫/白,灰/黑,灰/白,針頭長 20 mm,電纜長 2m	限單次使用	10 條
533671	皮下針電極紅色/黑色,針頭長 30 mm,電纜長 2m	限單次使用	10 條
533675	皮下針電極紅色/黑色,針頭長 40 mm,電纜長 2m	限單次使用	10 條
533641	皮下針電極紅色/黑色/綠色, 針頭長 15 mm,電纜長 1.5m	限單次使用	10 條

● 電極

編號	描述	備註	數量
522620	DELTA 電極連續直接刺激神經刺激電極	限單次使用	5 個

其它配件:

靜音感測器,編號:510005

製造廠名稱：inomed Medizintechnik GmbH

製造廠地址：Im Hausgrün 29,D-79312 Emmendingen, Germany

藥商名稱：企建科技股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)




08. 8. 07

“因諾美” 神經監測儀配件

產品彩色圖片




C2 NerveMonitor

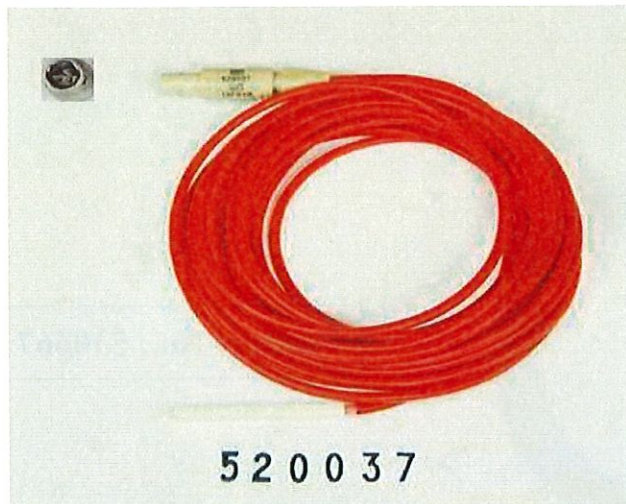


Product No.: 520037




8. 07

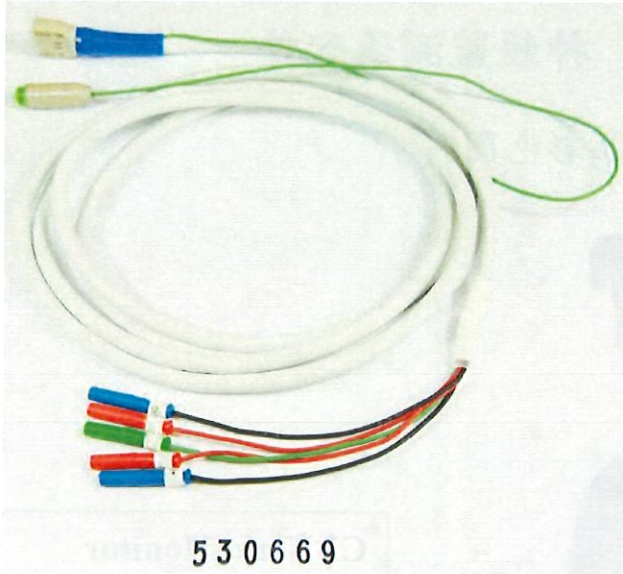

Product No.: 530669

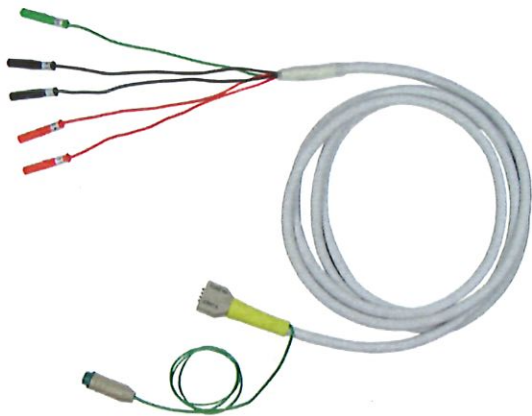


Product No.: 530665

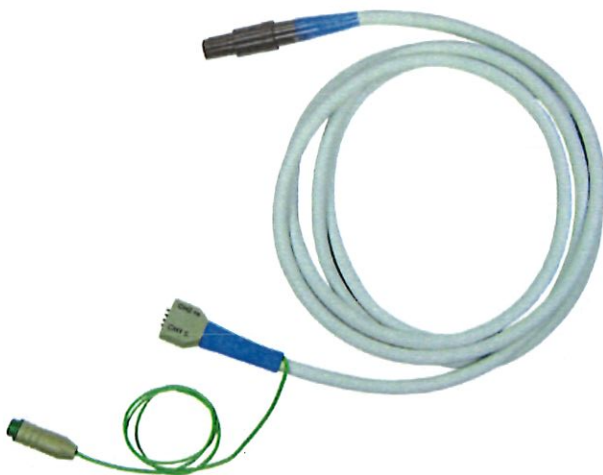

Product No.: 530667




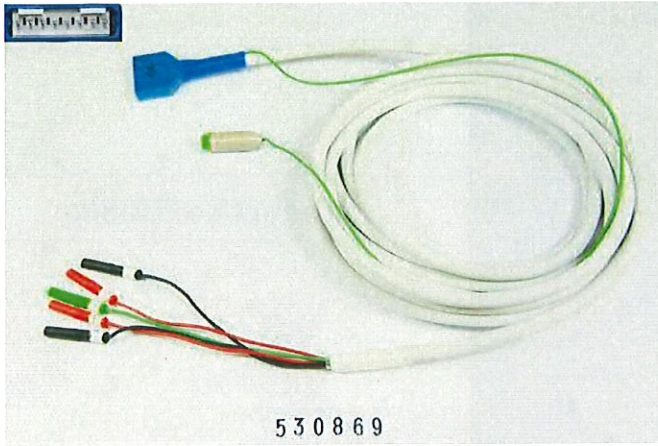

Product No.: 530869



Product No.: 520024

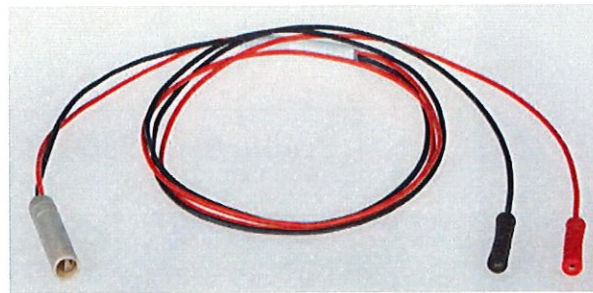


Product No.: 520078





ProductNo.:530866

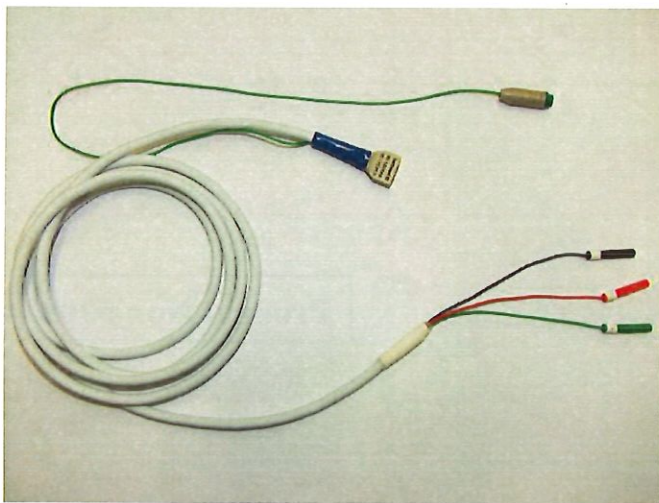


ProductNo.:530668



ProductNo.: 530858



108. 8. 07

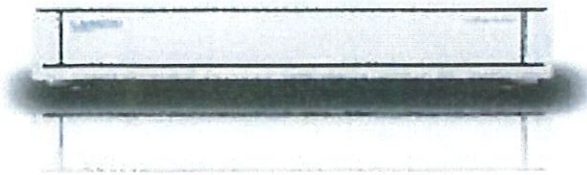


Product No.: 508560

C2 Wifi 套件




Product No.: 508300

螢幕推車

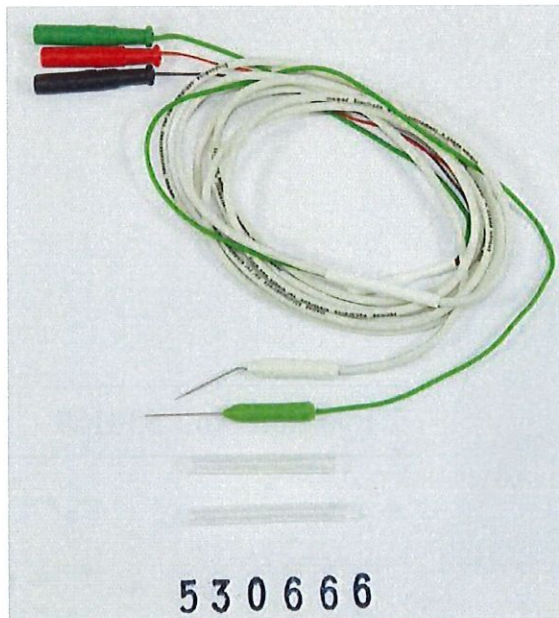

Product No.: 530666



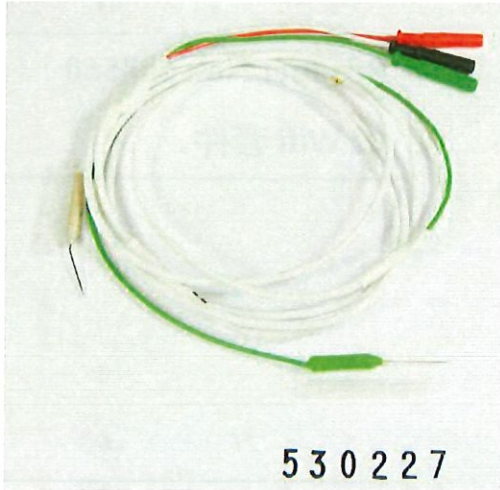


530227

Product No.: 530227



530228

Product No.: 530228

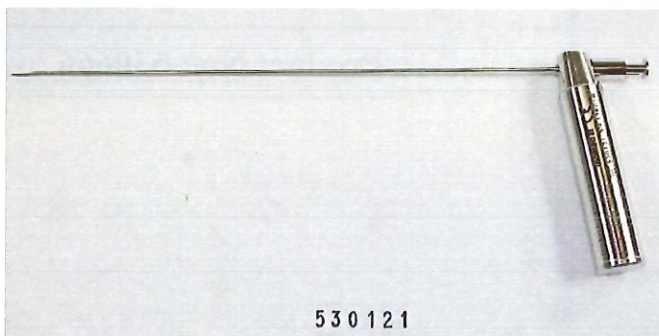

530121

Product No.: 530121





Product No.: 530655




Product No.: 530656



Product No.: 530855



Product No.: 530856

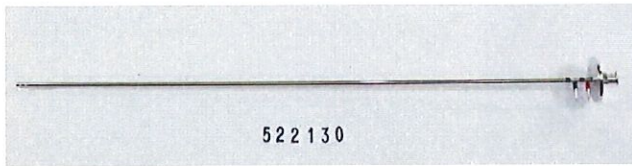


Product No.: 522130



Product No.: 532621




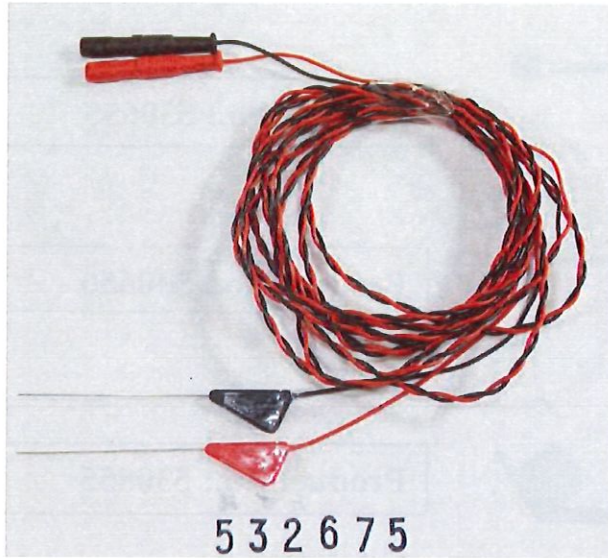


主 福 天
騎 縫 章
(器 輸)
藥 物 管

108. 8. 07




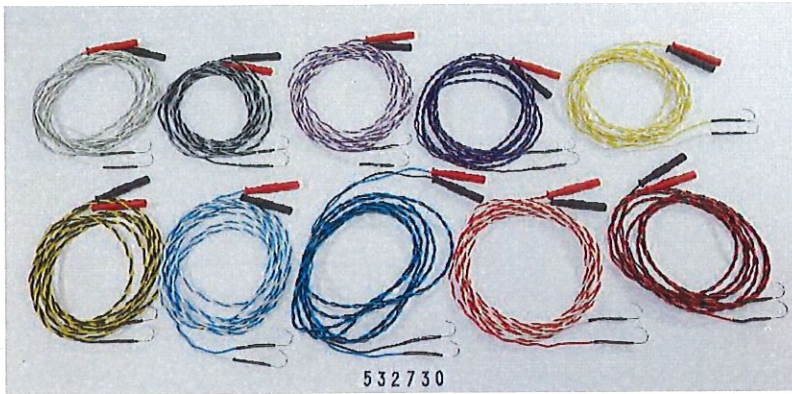


Product No.: 532730

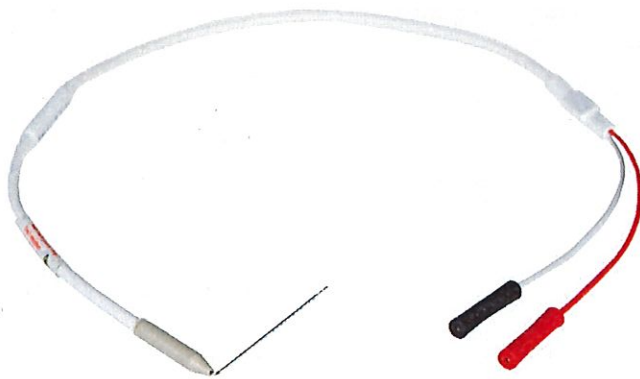


Product No.: 532710

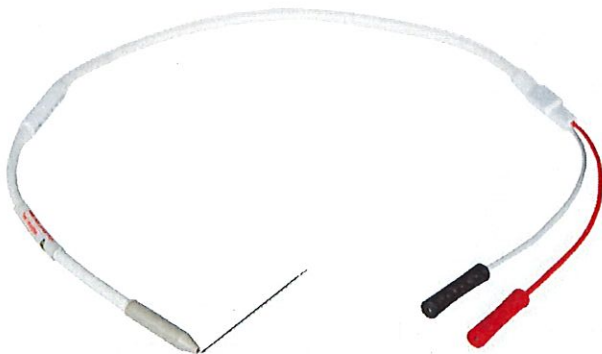


Product No.: 532711

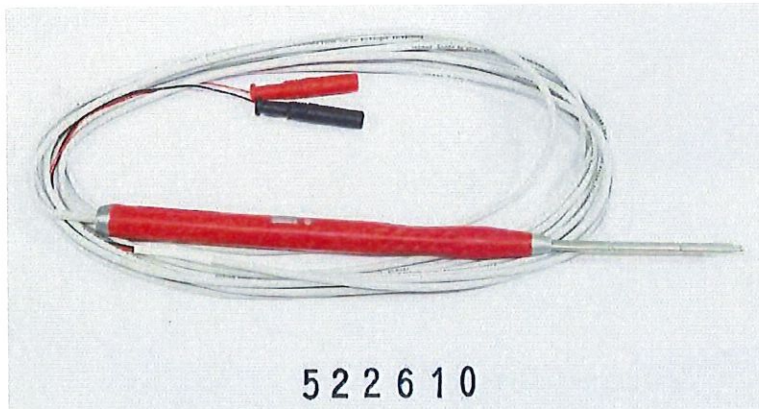


Product No.: 522610

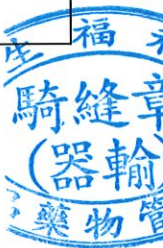


108. 8.

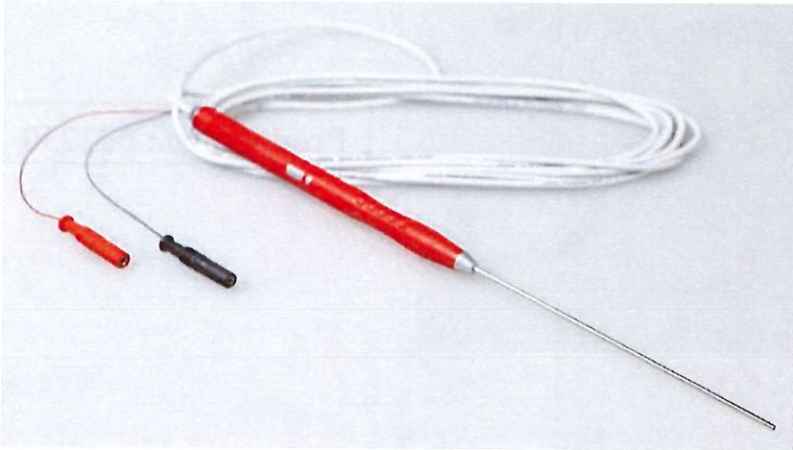


Product No.: 522600

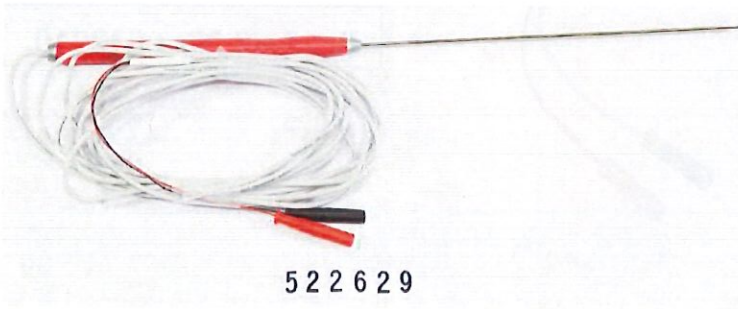


Product No.: 522629

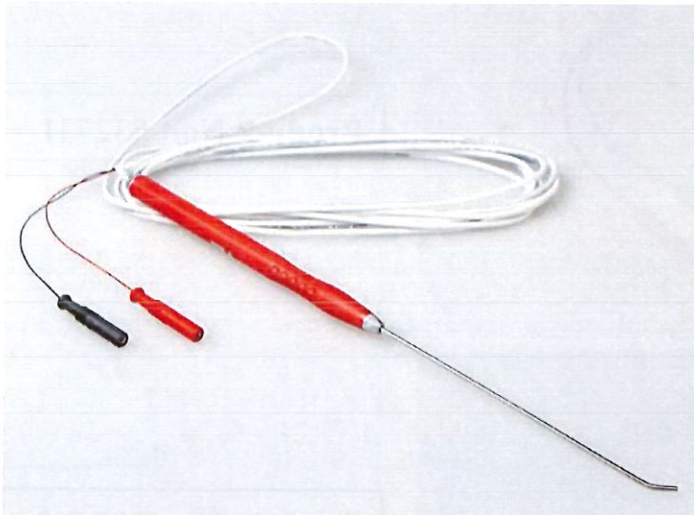


Product No.: 522601

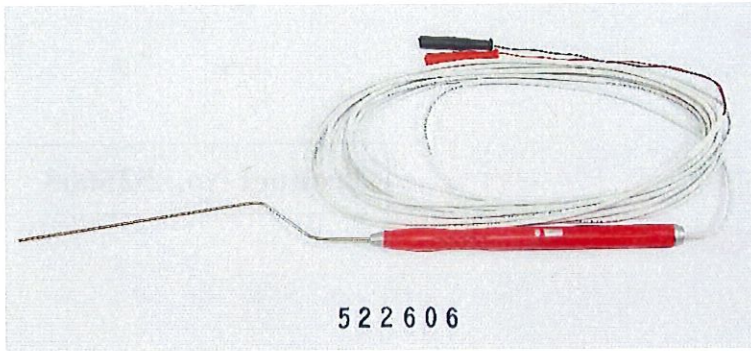


Product No.: 522606

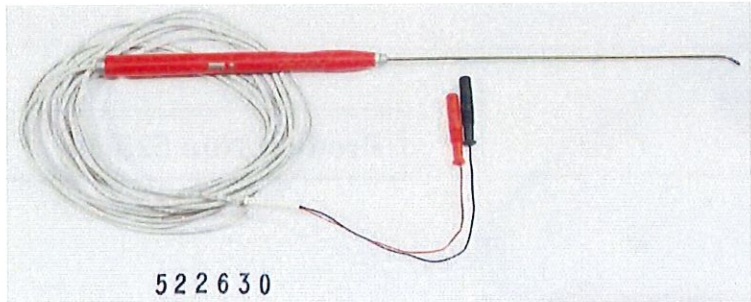

Product No.: 522630

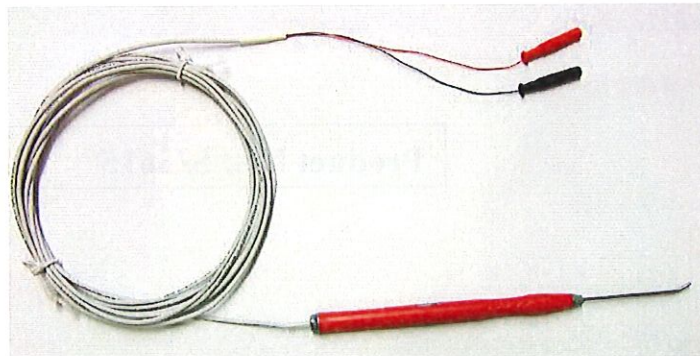

Product No.: 522603

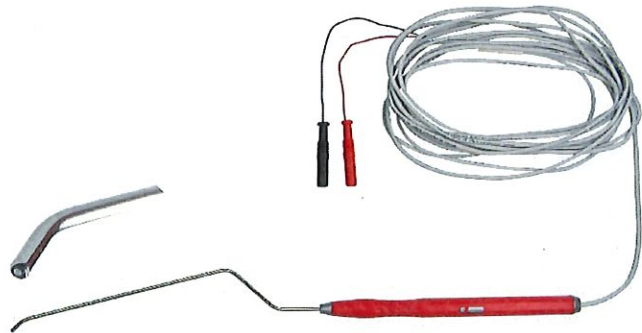


Product No.: 522605

福
騎縫
(器輸
藥物

108. 8. 0


部
理

07

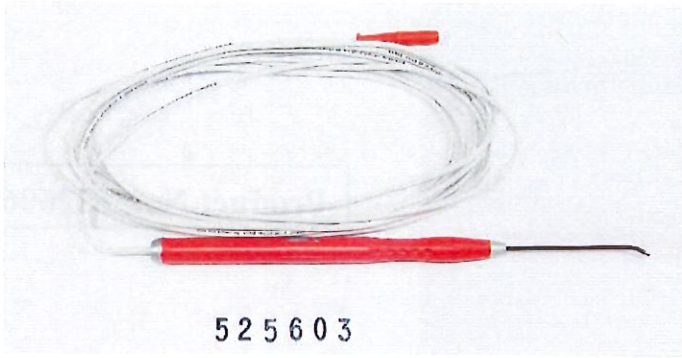


Product No.: 525603


8. 8. 07



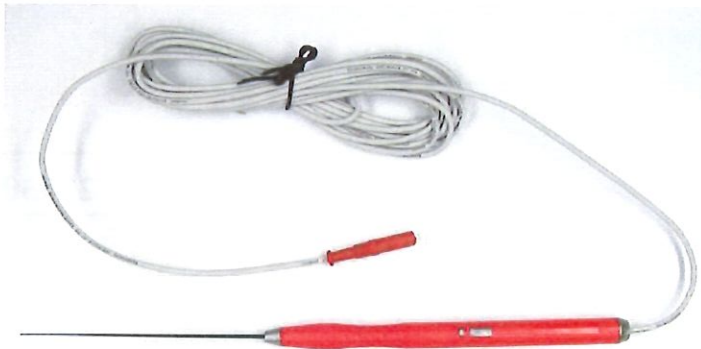


Product No.: 525608

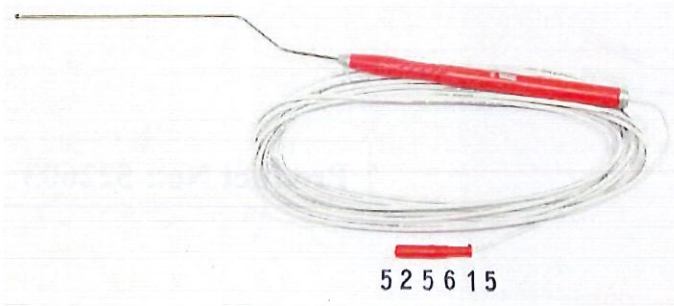


Product No.: 525615

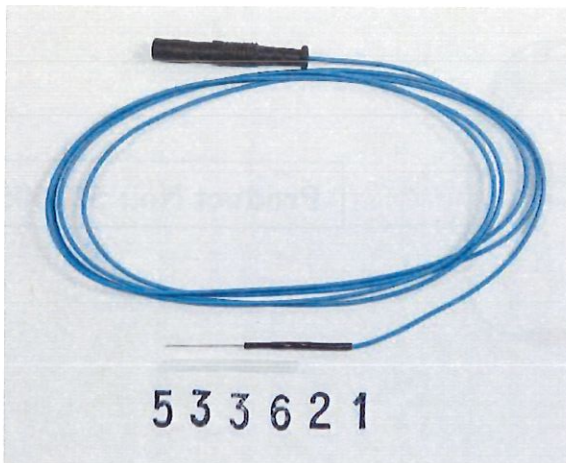

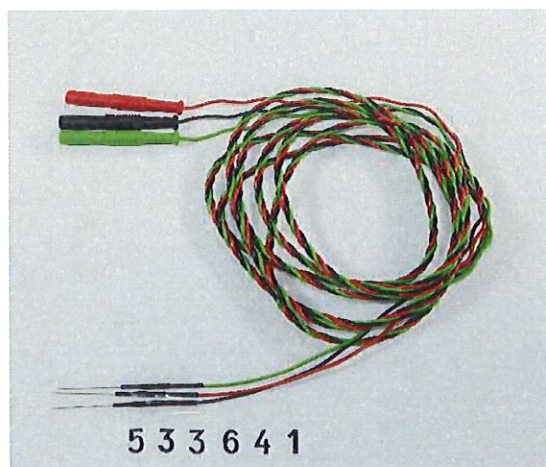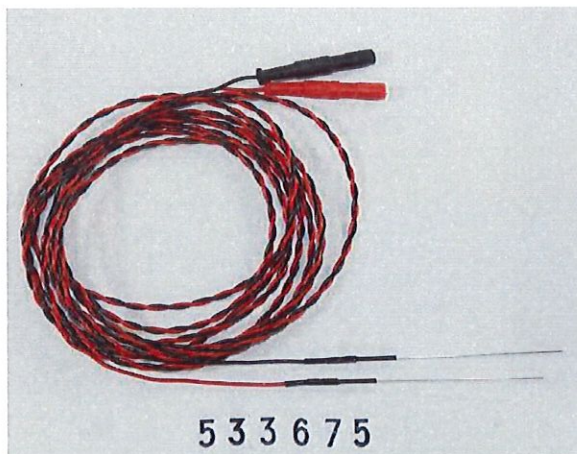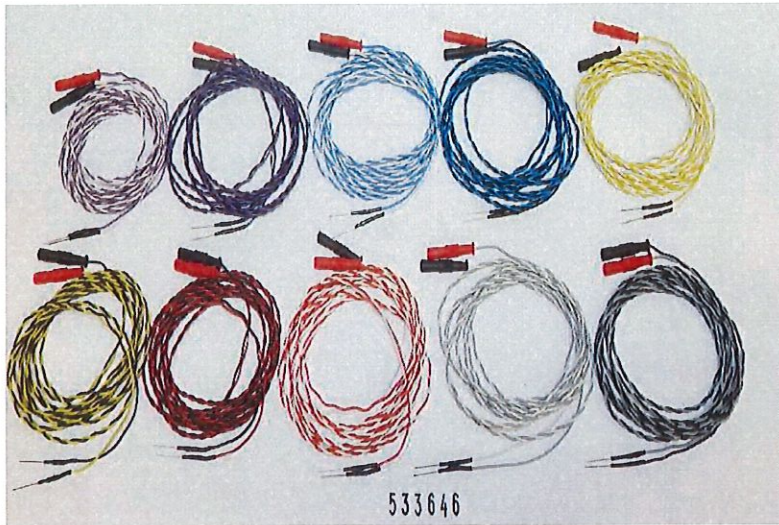

7

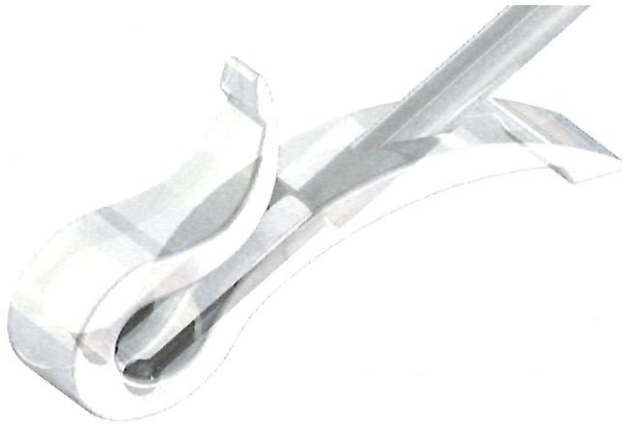

Product No.: 522620



Product No.: 510005